

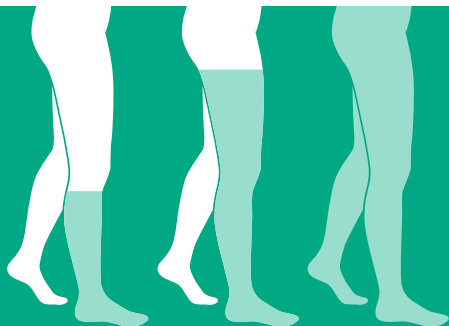
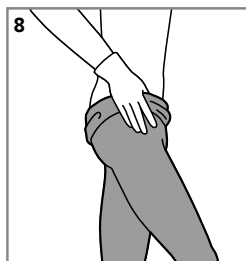
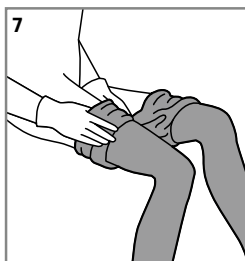
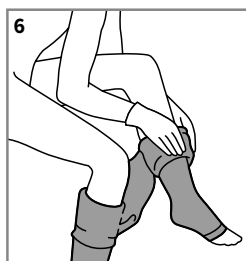
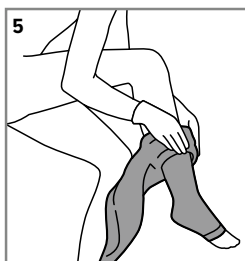


Kompresní punčochy a kalhoty

Návod k použití

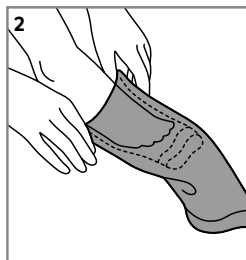

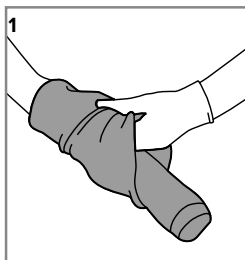

Stanovení účelu

Kompresní terapie zahrnuje opatření vnějších, plošných tlakových aplikací při problémech se žilami a poruchách lymfatického odtoku. Pomocí plošného tlaku se preventivně brání vzniku edémů a venóznímu zpětnému toku nebo lymfatickému odtoku. Kompresní oděv má optimální průběh tlaku, který je graduovaný. Těžiště používání kompresní terapie spočívá v ošetřování chorob žil a edémů. Přitom se používají komprimační, krycí a elastické tkaniny nebo pleteniny se dvěma otvory na extrémních místech. Kompresní terapie je zpravidla dlouhodobá léčba a vyžaduje příslušné výrobky, které dokáže pacient sám používat po předložení lékařské indikace na lékařský předpis.

Pokyny k používání

Při kompresních punčochách/ kalhotách s otevřenou špičkou používejte natahovací pomůcku Juzo Slippie. Váš odborný prodejce Vám ochotně ukáže správné používání. Natáhněte si kompresní oděv hned ráno poté, co vstanete. Natáhněte si kompresní oděv ráno ihned poté, co vstanete, na volnou nohu. Drsné nezbroušené nehty nebo prsteny s ostrými hranami mohou poškodit velmi jemnou pleteninu. Doporučujeme proto používat speciálních rukavic Juzo. Nehty na nohou a ztvrdlá kůže může vést ke škodám, stejně jako defektní vnitřek obuvi. Aby se zlepšilo pohodlné nošení Vašeho kompresního oděvu, můžete přílnavý okraj (pokud je k dispozici) vícekrát lehce nadzvednout během doby nošení. Při použití kombinovaných napojení musíte dávat pozor, aby se napojení dostatečně překrývala.

Kompresní punčochy

1. Natahujte punčochu vždy přes dolní část své ruky a sahejte přitom prsty zevnitř do oblasti nohy. Obrátte punčochu vytážením až po patu „vlevo“.
2. Roztáhněte otvor nohy oběma rukama a natáhněte díl nohy až po nárt přes nohu. Dávejte přitom pozor, aby seděla pletenina paty na patě.
3. Natahujte postupně punčochu dál a dál přes nohu – tak ji otočíte opět „vpravo“.
4. Pak musíte vyhnout punčochu rovnoměrně a bez záhybů – aniž by se přetáčela nebo táhla za okraje – a přiložit s plochou dlaní současně na nohu. Pokud jste vytáhli punčochu příliš nahoru, přesuňte ji jednoduše zpět až po kloub nártu a vytáhněte ji pak menším tahem nahoru. Tip: Obrátte před natažením přílnavý okraj (pokud je k dispozici).

5. Obrátte až po patu „vlevo“, vhoupněte první nohou tak, jak je popsáno v kroku 2 a 3, a vymodelujte až pod koleno.
6. Postupujte s druhou končetinou.
7. Poté, co jste obě strany natáhli až pod koleno, musíte obrátit obě strany opět „vpravo“ a vyhnout je postupně na obou nohou. Potom korigujte upevnění pleteniny plochou dlaně.
8. Potom vytáhněte část dříku nahoru až po pás. Dávejte pozor, aby se nacházel cíp svisle v rozkroku. Pozor: Vaše kompresní punčochové kalhoty se nesmí nikdy příliš roztáhnout. Rozděluje pleteninu v etapách zdola nahoru.

Respektujte prosím:

Noste svůj kompresní oděv pouze podle lékařského předpisu. Kompresní oděv může vydávat pouze příslušně zaškolený personál ve zdravotnické odborné prodejně. Váš kompresní oděv Juzo je velmi odolný proti olejům, masti, vlhkosti pokožky a jiným vlivům životního prostředí. Určitou kombinací může být negativně ovlivněna životnost pleteniny. Respektujte při punčochách s přílnavým okrajem: Nohy musí být bez chlupů a také bez oleje, pudru, krémů a mastí. Při poškození se obraťte na svého odborného prodejce. Neopravujte sami – mohla by se tak negativním způsobem ovlivnit kvalita a zdravotní účinky. Z hygienických důvodů je tento výrobek určen pouze pro jednu osobu. Všíťa textilní etiketa (je-li k dispozici) je důležitá pro identifikaci a možnost sledování výrobku. Proto vás žádáme, abyste za žádných okolností neodstraňovali etiketu. Je-li přiložen zipový nástavec: Nebezpečí spolknutí. Uchovávejte mimo dosah dětí – rodiče jsou za své děti zodpovědní.

Návod na praní a ošetřování

Respektujte pokyny k ošetřování na našité textilní etiketě nebo vytištěných údajích. Před praním se musí uzavřít zipy (pokud jsou k dispozici)! Doporučujeme, aby se kompresní oděv otočil před praním na rubovou stranu. Poprvé musíte prát kompresní oděv separátně (možnost pouštění barvy). Váš kompresní oděv by se měl prát pokud možno každý den v úsporném nebo jemnějším pracím režimu (40 °C). Tip: Síťka na praní dodatečně chrání pleteninu. Nepoužívejte aviváž! Při ručním praní dostatečně vypláchnout, neždmat. Doporučujeme jemný speciální prací prostředek Juzo. Aby se snížila doba sušení, můžete položit kompresní oděv po praní na hrubý froté ručník, pevně srolovat a silně vytlačit. Potom musíte volně zavěsit kompresní oděv. Nenechávejte ležet v ručníku a nesušte na topení nebo slunci. Při sušení v sušičce používejte úsporný režim (vhodné do sušičky: viz textilní nálepku příp. natištěné údaje). Kompresní oděv Juzo se nesmí chemicky čistit.

Složení materiálu

Přesné údaje můžete najít na našité textilní etiketě nebo natisknutých údajích.

Pokyny ke skladování a životnost

Skladovat na suchém místě a chránit před chladem. U sériových výrobků platí maximální doba skladování 36 měsíců. Potom se ukončí doba použitelnosti kompresního oděvu 6 měsíců. Doba používání závisí na správné manipulaci (např. při ošetřování, natahování a stahování) a používání výrobků v obvyklém rozsahu. Doba použitelnosti medicínského produktu je vytištěna se symbolem pískových hodin na etiketě krabice. Provedení na míru jsou produkty k okamžitému použití. Protože se na základě chorobopisu a individuálních životních podmínek mohou měnit tělesné proporce, jsou dimenzovány výrobky na míru pro dobu používání 6 měsíců. Po době používání 6 měsíců je nutná nová kontrola tělesných proporcí medicínským odborným personálem. Při závažné změně důležitých tělesných proporcí (např. na základě sledu léčení, změny hmotnosti) již léčené části těl může být odůvodněno nové měření a nové ošetřování také dříve, před uplynutím doby používání 6 měsíců.

Indikace

Chronická onemocnění: Zlepšení venózních symptomů, zlepšení kvality života při chronických venózních onemocněních, prevence a terapie venózních edémů, prevence a terapie venózních kožních změn, ekzémů a pigmentací, dermatoliposklerózy a bílá atrofie a venózních vředů na nohou (s přihlédnutím ke kontraindikacím), prevence recidivy venózních vředů na nohou, snížení bolesti venózních vředů na nohou, křečových žilách, počáteční fáze po terapii křečových žil, funkční venózní nedostatečnost, venózní malformace Tromboembolické venózní choroby: Povrchová venózní trombóza, hluboká žilní trombóza nohou, stav po trombóze, posttrombotický syndrom, profylaxe trombózy u mobilních pacientů

Edémy: Lymfedémy, edémy během těhotenství, postrau-matický edém, pooperační edém, pooperační reperfuční edém, cyklický idiopatický edém, lipedémy, zácpa v důsledku nehybnosti (syndrom artrogenní zácpy, parézy a částečná parézy ve stoje), edém způsobený léky, pokud není možná žádná změna

Jiné indikace: Obezita s funkční žilní nedostatečností, zánětlivé dermatózy nohou, nevolnost, závratě během těhotenství, problémy se zácpou během těhotenství Při těhotenství se používají při ošetřování prostřednictvím punčoch při měnícím se objemu břicha výlučně části punčoch určených pro těhotenství. Po popálení a ošetřování šíje doporučujeme používat naše speciální výrobky k léčení šíje.

Kontraindikace

Pokročilé periferní arteriální onemocnění (je-li tento parametr k dispozici: ABPI < 0,5, tlak arterií kotníku < 60 mmHg, tlak prstů < 30 mmHg nebo TcPO₂ < 20 mmHg nárt). De-kompenzované srdeční selhání (NYHA III + IV), septická flebitida, Phlegmasia coerulea dolens.

V následujících případech by se mělo o léčbě rozhodnout po zvážení přínosů a rizik a výběru nejvhodnějšího kompresního zařízení:

Výrazné mokvající dermatózy, nekompatibilita kompresního materiálu, závažné poruchy citlivosti, pokročilá periferní neuropatie (např. při Diabetes mellitus), primární chronická polyartritida.

Důležité

Vznikají-li v léčené oblasti otevřená rána, musí se oblast rány nejprve zakrýt příslušnou náplastí na rány nebo bvazem ještě předtím, než se natáhne kompresní oděv. Při nedodržování těchto kontraindikací nepřebírá podnikatelská skupina Julius Zorn GmbH žádnou záruku.

Vedlejší účinky

Při odborném používání nejsou známy žádné vedlejší účinky. Pokud by došlo přesto ke vzniku negativních změn (např. podráždění pokožky) během předepsaného používání, pak se obraťte neprodleně na svého lékaře nebo zdravotnickou odbornou prodejnu. Pokud by byla známa nesnášenlivost oproti látce, kterou obsahuje tento výrobek, musíte před použitím konzultovat se svým lékařem. Pokud by se během doby nošení zhoršovaly vaše obtíže, stáhněte si výrobek a vyhledejte bezodkladně odborný lékařský personál. Výrobce neručí za škody/zranění, které vznikají na základě neodborné manipulace nebo používání k jiným účelům.

V případě reklamaci v souvislosti s produktem, jako například poškození pleteniny nebo nedostatky v přizpůsobení, obraťte se přímo na vašeho prodejce zdravotnických potřeb. Pouze závažné události, které mohou vést k výraznému zhoršení zdravotního stavu nebo smrti, musí být nahlášeny výrobcí a příslušnému úřadu členského státu. Závažné události jsou definovány v článku 2 č. 65 Nařízení (EU) 2017/745 (MDR).

Likvidace

Na konci používání musí být výrobek zpravidla zničen běžným postupem likvidace. Respektujte přitom platné místní/národní předpisy.

Doplňková informace pro výrobky s obsahem stříbra:

Protože stříbro může vést teplo a elektřinu, musí se zabránit jeho přímému kontaktu s elektrickými zdroji. Expert Silver/Juzo Expert Strong Silver/Juzo Dynamic Silver by se neměly dostávat v mokřém stavu do kontaktu s kovy (např. kovový věšák na šaty). Stříbro v punčochě by se tak mohlo přebarvit. Prostřednictvím tříslovin, které se používají k výrobě kůže vnitřní vložky obuvi, může docházet k prebarvení punčochy a stříbrného vlákna v oblasti chodidla.

Dodatečné informace pro Dip Dye Collection

U kompresních výrobků Juzo v designu Dip Dye se jedná o unikáty. Barevná paleta jednotlivých kusů je individuální a lze ji proto pouze podmíněně reprodukovat. Na základě výrobního procesu jsou možné barevné odchylky.

Dodatečné informace pro Batik Collection

U kompresních výrobků Juzo v designu Batik se jedná o unikáty. Vzorek barvy ručně vyráběných samostatných kusů je jedinečný a nedá se proto reprodukovat. Může také dojít k nepatrným změnám barvy po prvním praní. Prostřednictvím výrobního procesu vzniká typický zmačkaný design. Tento je vidět jen na výrobku, který se nenosí, ale ne na výrobku, který se nosí. Na základě speciální techniky barvení jsou tyto kompresní výrobky v neobnošeném stavu o něco déle než výrobky bez designu batik. Nemá to však vliv na přesnost přizpůsobení a medicínské účinky.

Zpětná vazba

Máte zpětnou vazbu k našim produktům, návrhy nebo nápady? Pak se prosím zúčastněte našeho průzkumu.



Do you have any product feedback, suggestions or ideas you'd like to share? If so, please take our survey.



Platí pro:

Juzo Inspiration, Juzo Soft, Juzo Adventure, Juzo Hostess, Juzo Move, Juzo Dynamic/Silver/Cotton, Juzo Intenso, Juzo Expert/Silver/Cotton, Juzo Expert Strong/Silver/Cotton

Made in Germany



www.juzo.com



Julius Zorn GmbH · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Germany · info@juzo.com · juzo.com



Berro AG · Austrasse 7 · 9055 Bühler · Suisse

UK responsible person: Juzo UK Ltd

The Vision Building · 20 Greenmarket · Dundee DD1 4QB · Great Britain