



mewa

ILUSTRÁČNÍ FOTO



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Vydání 11 / 2024-09-16

Speciální zdravotní kočárek MEWA

JEDNÁ SE O ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

POUŽÍVEJTE JEJ PODLE NÁVODU K POUŽITÍ NEBO ŠTÍTKU.

ÚČEL PŘÍRUČKY

Návod k obsluze je určen pro osoby, které přímo pečují o děti se zdravotním postižením (asistenti, rodiče, opatrovníci), kteří budou přepravovat tyto děti v kočárku. Je určen také pro lékaře a fyzioterapeuty obsluhující kočárek.

Upozornění! Před použitím kočárku je každý uživatel povinen přečíst si návod k obsluze a jednat v souladu s jeho pokyny.

Upozornění! V případě jakýchkoli zdravotních příhod souvisejících s užitím kočárku MEWA musí být výrobce neprodleně písemně informován kontaktováním doporučeným dopisem nebo e-mailem s potvrzením o přijetí.

Kontaktní údaje výrobce:

- poštovní adresa: MyWam sp. z o.o., ulice Lwowska 34, 41-500 Chorzów, Polsko
- Kontaktní telefonní číslo: +48 32 733 11 31
- E-mailová adresa: mywam@mywam.eu



Verze návodu k obsluze a údržbě: CZ Vydání 11 / 2024-09-16

MyWam sp. z o.o. si vyhrazuje právo provádět technické a obchodní změny obsahu Návodu k obsluze a údržbě bez předchozího upozornění. Každá změna bude určena datem poslední aktualizace pokynů. Elektronická verze manuálu je k dispozici na [adrese www.mywam.eu](http://adrese.www.mywam.eu)

Upozornění! Obrázky uvedené v návodu k obsluze jsou pouze orientační a mohou se lišit od zakoupeného modelu.

Společnost MyWam sp. z o.o. zavedla systém řízení kvality v souladu s normou ISO 13485 při navrhování, výrobě a prodeji zdravotnických prostředků třídy I. Systém certifikovaný LL-C (certifikace).



ISO 13485

LL-C (Certification)



OBSAH

ÚČEL PŘÍRUČKY.....	2
OBSAH	3
1. ÚČEL A INDIKACE PRO POUŽITÍ	5
2. ŠTÍTKY	5
3. OZNAČENÍ SYMBOLŮ.....	5
4. DŮLEŽITÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	6
5. CELKOVÁ KONSTRUKCE KOČÁRKU	7
6. FUNKCE KOČÁRKU	9
6.1. Rozložení rámu kočárku	9
6.2. Složení rámu kočárku	10
6.3. Sedadlo	10
6.4. Převravní zámek. Odjištění a zajištění zámku	13
6.5. Přední otočná kola. Směrový zámek předních kol.....	13
6.6. Zadní kola. Montáž a demontáž zadních kol na nápravě	14
6.7. Systém odpružení zadních kol	15
6.8. Tlačná rukojeť kočárku	15
6.9. Centrální brzda	16
6.10. Naklápěcí patka	16
6.11. Stupačka	16
6.12. Nastavitelné opěradlo	17
6.13. Pětibodové pásy	18
6.14. Bezpečnostní bariéra.....	19
6.15. Nastavitelná stříška s oknem.....	20
6.16. Stabilizační pásy	21
6.17. Hlavové peloty.....	22
6.18. Trupové peloty	22
6.19. Podušky	23
6.20. Držák poháru	23
7. DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ	24
7.1. Klín	24
7.2. Terapeutický stůl	24
7.3. Nákupní košík.....	25
7.4. Sada pro zmenšení sedu	25
7.5. Cestovní taška.....	26
7.6. Slunečník	26

7.7. Zimní rukavice	26
7.8. Nánožník (umístí se na bezpečnostní zábranu)	27
7.9. Moskytiéra (přípevněná k nastavitelné stříšce s oknem)	27
7.10. Pláštěnka (přípevněná k nastavitelné stříšce s oknem)	27
8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOČÁRKU MEWA	28
8.1. Materiálové složení kočárku	28
9. DODÁVKA A NÁSTROJE	28
10. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOČÁRKU	29
11. PŘÍ32PRAVA K POUŽITÍ	30
12. PŘEM32ÍSTĚNÍ KOČÁRKU	30
13. NASTUP33OVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ Z KOČÁRKU	31
14. SPRÁVNÁ 33POLOHA V KOČÁRKU	31
15. POUŽÍVÁNÍ K34OČÁRKU	31
16. POHYB PO ŠIKM34ÝCH PLOCHÁCH	31
17. PŘEKONÁVÁNÍ PRA35HŮ NEBO OMEZENÍ	32
18. PŘEPRAVA V AUTĚ A V JINÝCH VOZIDLECH	32
19. ČIŠTĚNÍ A PÉČE	32
20. ULOŽENÍ KOČÁRKU	33
21. SERVISNÍ A PERIODICKÉ PROHLÍDKY	33
22. LIKVIDACE	34
23. SOULAD S POŽADAVKY NA ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY	34
24. SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH MÍST	35
25. ZÁRUČNÍ LIST	36
26. POZNÁMKY	37

1. ÚČEL A INDIKACE PRO POUŽITÍ

Kočárek pro speciální potřeby MEWA je zdravotnický prostředek I. třídy určený pro použití u zdravotně postižených dětí, které kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou chodit, stát nebo sedět bez pomoci. Výrobek je určen k přepravě a pohybu výše uvedených osob v poloze vsedě nebo vleže a ke korekci držení těla a je k němu určen.

Klinické indikace zahrnují dětskou mozkovou obrnu, meningeální kýlu, dystrofie, parézy atd.

Zařízení je určeno pro uživatelé ve věku od 3 do 10 let, s výškou 90-125 cm a hmotností do 40 kg. Přípravek by měl být používán podle doporučení ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta.

Kontraindikace:


Pokud existuje kontraindikace sezení a/nebo pasivní vertikalizace, je třeba nastavení kočárku konzultovat s fyzioterapeutem nebo praktickým lékařem.

2. ŠTÍTKY


Typový štítek



Kód UDI

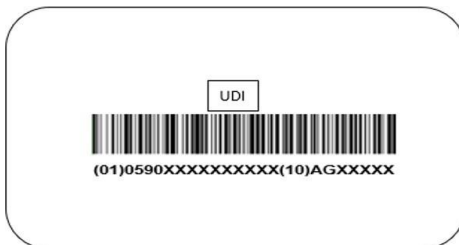

Výstražný štítek

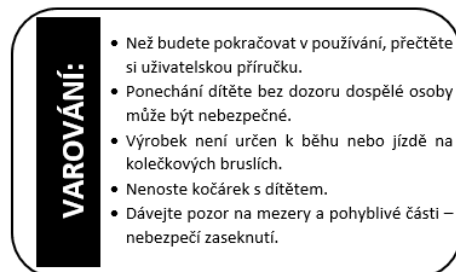

3. OZNAČENÍ SYMBOLŮ

	Sériové číslo produktu		Název výrobce
	Povolená celková hmotnost uživatele		Výrobek je zdravotnický prostředek
	Datum výroby	 Ikona " VAROVÁNÍ! " Deskriptor a symbol v této příručce se používají k posílení pozornosti čtenáře k obsahu označenému tímto znakem. Nedodržení obsahu označeného tímto popisem může ohrozit zdraví a bezpečnost uživatele a doprovodných osob a může vést k poškození produktu.	
	Značka posouzení shody podle platných evropských nařízení a směrnic		
	Varování před postupem v souladu s návodem k obsluze a údržbě výrobku		

4. DŮLEŽITÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Je zakázáno používat kočárek způsobem, pro který není určen.
- Výrobek obsahuje malé části, které mohou být při požití dítětem nebezpečné!
- Je zakázáno pokládat na kočárek další váhu, zejména pokládat další váhu na zadní stranu opěradla, např. batoh nebo tašku. To může způsobit převrácení kočárku MEWA a zranění uživatele! To neplatí pro originální příslušenství určené pro kočárek MEWA, které nepřekračuje povolené zatížení. Všechny další součásti připevněné ke kočárku ovlivňují stabilitu kočárku.
- **POZOR:** Nikdy nenastavujte kočárek, pokud uživatel není zajištěn pětibodovými pásy.
- **POZOR:** Při používání kočárku a při skládání a nastavování mechanismů je třeba věnovat zvláštní pozornost pohyblivým částem, protože může hrozit nebezpečí zachycení a/nebo přiskřípnutí částí těla uživatele/pečovatele v otvorech/mezerách mezi součástmi.
- **POZOR:** V závislosti na provedených úpravách - pokud jde o nastavení tlačné rukojeti, nastavení výšky opěradla, nastavení úhlu opěradla, hloubku sedadla, nastavení úhlu sedáku, nastavení úhlu opěrky nohou a nastavení opěrky nohou - může tento kočárek překročit doporučené maximální rozměry.
- **POZNÁMKA:** Při průchodu dveřmi nebo podobnými zúženími, která omezují směr jízdy kočárku, zajistěte, aby byl na obou stranách kočárku dostatek místa, aby se zabránilo zachycení rukou nebo jiných částí těla a také aby se zabránilo poškození kočárku.
- **POZNÁMKA:** Teplota kočárku se může zvýšit, když je kočárek vystaven slunečnímu záření.

VAROVÁNÍ!



- Nikdy nenechávejte své dítě v kočárku bez dozoru, protože hrozí nebezpečí!
- Tento výrobek není vhodný pro běh nebo bruslení nebo jízdu na kolečkových bruslích.
- Kočárek není určen jako sedačka v motorovém vozidle.
- Dávejte pozor na štěrby a pohyblivé části - nebezpečí zaseknutí.
- Nenoste kočárek s dítětem.
- Kočárek je zabalen v plastovém sáčku. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí.

- **POZOR:** Je zakázáno používat kočárek, pokud technický stav výrobku nebo jeho jednotlivé součásti vzbuzují pochybnosti uživatele nebo je zjevně poškozený, v takovém případě se nesmí používat. V tomto případě je nutné se naléhavě obrátit na prodávajícího s žádostí o radu.

5. CELKOVÁ KONSTRUKCE KOČÁRKU

Základní výbava



- 1- Stříška s oknem
- 2- Peloty hlavy
- 3- Podušky
- 4- Bezpečnostní bariéra
- 5- Peloty trupu
- 6- Stabilizační pásy
- 7- Nastavitelná opěrka nohou s popruhy
- 8- Pětibodové pásy
- 9- Mechanismus nastavení sedadla
- 10- Převrtní zámek

- 11- Posuvná rukojeť
- 12- Držák nápojů
- 13- Mechanismus nastavení opěradla
- 14- Systém odpružení zadního kola
- 15- Naklápěcí patka
- 16- Centrální brzda
- 17- Čalounění opěradel a sedadel
- 18- Zámek směru předního kola
- 19- Přední kola s otočnými kolečky
- 20- Zadní kola

Doplňkové vybavení



- 1- Sada pro zmenšení sedu
- 2- Terapeutický stůl
- 3- Slunečník
- 4- Moskytiéra
- 5- Pláštěnka

- 6- Nánožník
- 7- Klín
- 8- Zimní rukavice
- 9- Nákupní košík
- 10- Cestovní taška

6. FUNKCE KOČÁRKU

6.1. Rozložení rámu kočárku

1



2



Nasaďte všechna kola

3



Zatáhněte za přepravní zámek

4



Zatáhněte za rukojeť směrem k sobě

5




6.2. Složení rámu kočárku



1

Stiskněte červené tlačítko

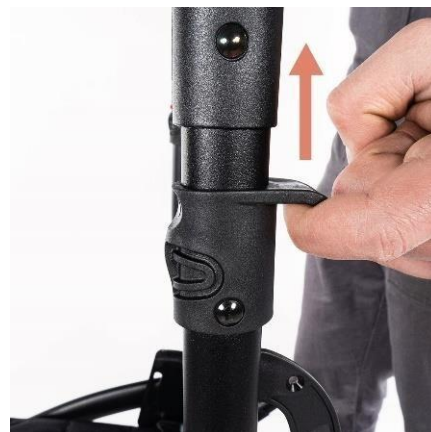

2

Současně zatáhněte za úchyty na obou stranách rámu směrem nahoru



3



4

6.3. Sedadlo

Způsoby sestavení sedačky



Mechanismus pro montáž sedačky na rám



Sestava sedadla



Zasuňte kovový držák do upevňovacího mechanismu sedadla



Demontáž sedačky



Zatlačte na obě strany kočárku na červená tlačítka a vysuňte sedačku z rámu.

Mechanismus nastavení úhlu sedadla



Zatáhněte za rukojeť směrem k sobě a změňte úhel sedadla.

Nastavení úhlu sedadla



POZNÁMKA: Jakákoli změna sklonu sedadla mění celkové těžiště. To má vliv na stabilitu kočárku.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je pětibodový pás uživatele správně zapnutý, aby byla zajištěna stabilizace těla při změně úhlu sedadla.

6.4. Převravní zámeček. Odjištění a zajištění zámku



1

Zajištěný zámeček



2

Odjištěný zámeček



6.5. Přední otočná kola. Směrový zámeček předních kol

Sestavení kol



1

Demontáž kol



2



1



2

Zablokování předních kol



Odjištění předních kol



6.6. Zadní kola. Montáž a demontáž zadních kol na nápravě

Sestavení kol



Demontáž kol



6.7. Systém odpružení zadních kol



Tvrdé odpružení



Měkké odpružení

6.8. Tlačná rukojeť kočárku

Mechanismus nastavení úhlu rukojeti



Stiskněte tlačítka na obou stranách a změňte úhel rukojeti.

Nastavení úhlu tlačné rukojeti



6.9. Centrální brzda



Centrální brzda se používá pouze a výhradně k úplnému zablokování kol a nemá funkci dynamického brzdění!

POZNÁMKA! Stav brzd by měl být pravidelně kontrolován a měly by být odstraněny veškeré nečistoty a bláto.

6.10. Naklápěcí patka



Pomocí naklápěcí patky snáz najedete s kočárkem na malé prahy nebo obrubníky.

6.11. Stupačka

Nastavení výšky opěrky nohou



Minimální výška



Maximální výška

Nastavení úhlu opěrky nohou




Stiskněte tlačítka na obou stranách a změňte úhel opěrky nohou.



Poznámka: Během přepravy, skladování, rehabilitace, nastupování a vystupování z kočárku musí být opěrka nohou sklopena.

6.12. Nastavitelné opěradlo

Mechanismus nastavení úhlu opěradla

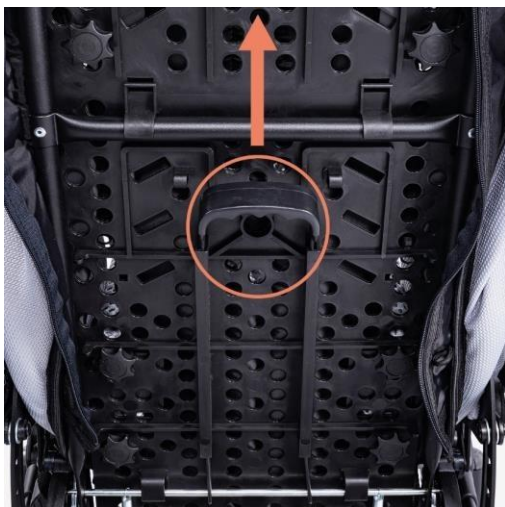

1



2

Nastavení úhlu opěradla




Poznámka: Při každé změně úhlu opěradla je nutné znovu nastavit délku pětibodových pásů.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je pětibodový pás uživatele správně zapnutý, aby byla zajištěna stabilizace těla při změně úhlu opěradla.

6.13. Pětibodové pásy



Nastavení pásů

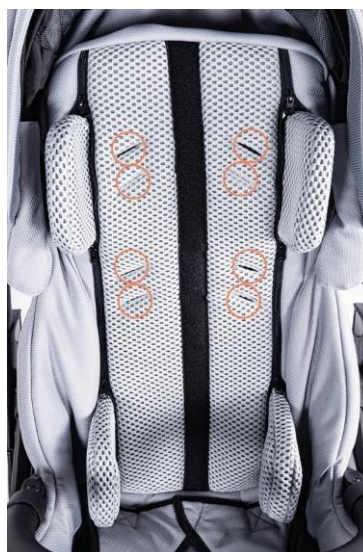

6.14. Bezpečnostní bariéra



Montáž bariéry



1





2

Demontáž bariéry



6.15. Nastavitelná stříška s oknem

Mechanismus pro montáž stříšky

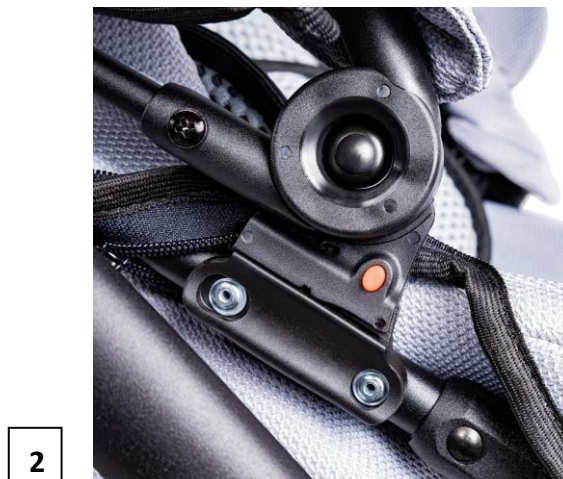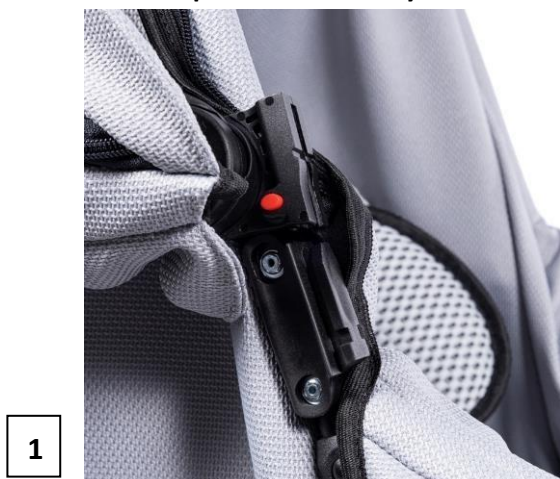

Zasuňte nástavec stříšky do nástavce na rámu kočárku.

Sejmutí provedete pomocí červeného tlačítka na vnější straně nástavce stříšky na obou stranách.

Změna velikosti plochy stříšky




Okno s moskytiérou




6.16. Stabilizační pásy




6.17. Hlavové peloty

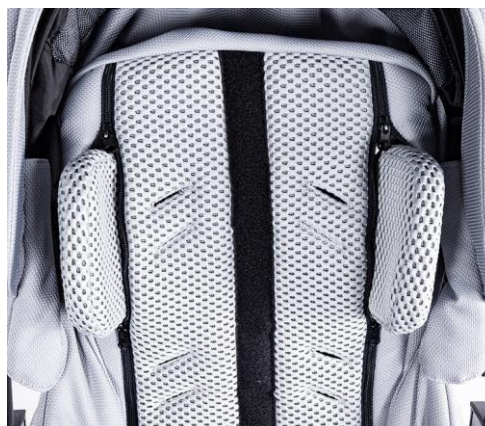


Nastavení pelot

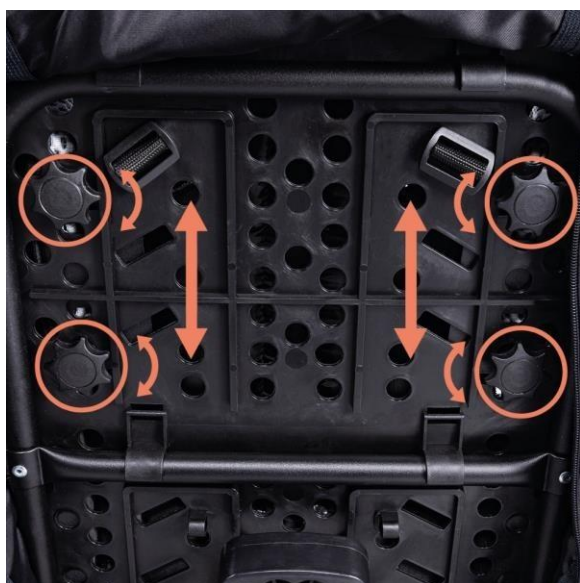

6.18. Trupové peloty

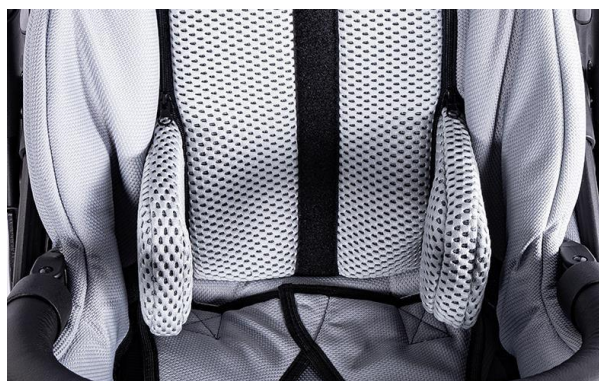

Nastavení pelot

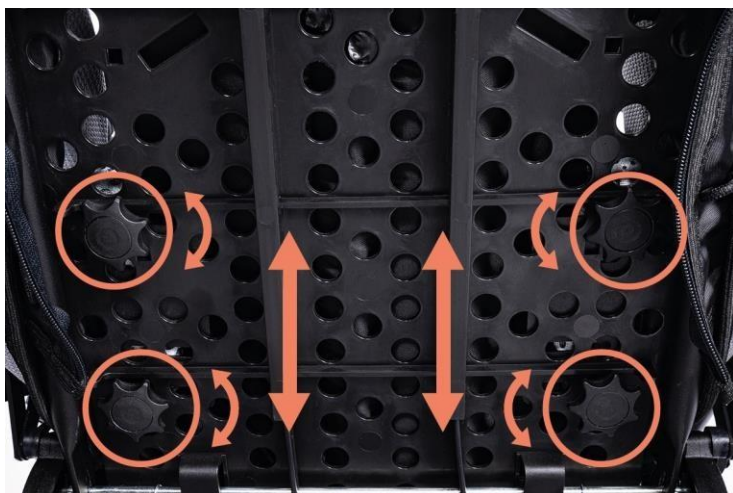

6.19. Podušky



Připněte na opěradlo kočárku, pokud není instalováno jiné příslušenství.

6.20. Držák poháru



7. DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

7.1. Klín

Klín má dvoustupňovou úroveň nastavení.



7.2. Terapeutický stůl



Maximální zatížení je 3 kg.

Upevnění stolíku



1



2

Demontáž stolíku

1



2



7.3. Nákupní košík



Maximální zatížení je 3 kg.

7.4. Sada pro zmenšení sedu



7.5. Cestovní taška



Maximální zatížení tašky
je 2 kg.

7.6. Slunečník



7.7. Zimní rukavice



7.8. Nánožník (umístí se na bezpečnostní zábranu)



7.9. Moskytiéra (připevněná k nastavitelné stříšce s oknem)



7.10. Pláštěnka (připevněná k nastavitelné stříšce s oknem)



8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOČÁRKU MEWA

délka kočárku	97-132 cm
šířka kočárku	62,5 cm
výška kočárku	125 - 128 cm
celková hmotnost	20,5 - 25 kg
efektivní hloubka sedáku	24*/28 cm
Šířka sedáku	25*/32 cm
výška opěradla	62 cm
šířka opěradla	20** / 30 cm
vzdálenost mezi opěrkou nohou a sedadlem / počet nastavení	17-32 / 5 pozic
délka kočárku ve složeném stavu pro přepravu	rám 84 cm / sedák 88 cm
šířka kočárku složeného pro přepravu	rám 61 cm / sedák 43 cm
výška kočárku ve složeném stavu pro přepravu	rám 26 cm / sedák 42 cm
kapacita nákupního košíku	3 kg
Nosnost tašky	2 kg
maximální hmotnost dítěte	40 kg
maximální výška dítěte	90-125 cm
úhel roviny sedadla / počet nastavení	cca 6,6°-22,6° / 4 polohy
úhel sklonu opěradla / počet nastavení	cca. 9°-87° / 4 polohy + sklonění
úhel opěrky nohou / počet nastavení	cca. 64°-180° / 5 pozic

POZNÁMKY: *) hodnoty uvedené s pady, ** hodnoty uvedené bez padů

Tolerance naměřených hodnot +/- 20 mm, +/- 1,5 kg, +/- 1°

Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických parametrů.

8.1. Materiálové složení kočárku

Materiálové složení kočárku: práškově lakovaná ocel a aluminim, tkaniny 100% polyester a plast (PP, PCV, PA, PU).

9. DODÁVKA A NÁSTROJE

Originální obal by měl obsahovat následující položky:

- Složený rám kočárku se sedákem a opěradlem, opěrkou nohou, koly, stříškou, podložkami, držákem nápojů, bezpečnostní bariérou, poduškami,
- Doplnkové vybavení dle objednávky,
- Uživatelská příručka se záručním listem.

Před použitím:

- a. Ujistěte se, že obal nebyl poškozen. Pokud se zjistí, že je obal poškozený, pak za přítomnosti kurýra zboží vybalte a zkontrolujte, zda nebyl poškozen žádný z prvků kočárku.
- b. Na základě specifikace zkontrolujte obsah balení (v případě, že některé prvky chybí, kontaktujte svého prodejce).

K montáži nebo demontáži kočárku MEWA není zapotřebí žádné nářadí, s výjimkou nastavení výšky opěrky nohou, kde je vyžadován křížový šroubovák a 8mm plochý klíč.

10. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOČÁRKU

- **Montáž kočárku.** Výrobek je z výroby zabalen v původním kartonu a je již předem smontován. Dokončete sestavu provedením následujících kroků:
 - a) namontujte přední kola,
 - b) namontujte zadní kola na nápravu,
 - c) rozložte rám kočárku se sedačkou úpravou parametrů:
 - o zapněte/vypněte zámek směru předního kola,
 - o nastavení výšky a úhlu rukojeti pro tlačení kočárku,
 - o nastavení úhlu sklonu sedadla,
 - o nastavení úhlu sklonu opěradla,
 - o nastavení délky pětibodových pásů,
 - o nastavení výšky a úhlu opěrky nohou,
 - o nastavení abdukčních a stabilizačních pásů,
 - o nainstalujte bezpečnostní bariéru,
 - o upravte stříšku s oknem,
 - o nastavte peloty hlavy a trupu,
 - d) Namontujte příslušná zařízení a upravte parametry, například:
 - o k nastavení šířky a využitelné hloubky sedadla (zužující se a měkké vložky),
 - o nainstalujte terapeutický stůl,
 - o nainstalujte a upravte klín,
 - o nainstalujte cestovní tašku,
 - o nainstalujte nákupní košík,
 - o nainstalujte vybrané vybavení určené pro roční období: nánožník, zimní rukavice, moskytiéru, pláštěnku, deštník.
- **Demontáž kočárku:**
 - a) odstraňte přídatné zařízení,
 - b) uvolněte sedadlo,
 - c) zablokujte přední kola, sklopte opěrku nohou a rám kočárku,
 - d) uvolněte zadní kola,
 - e) složte kočárek a zajistěte přepravním zámkem.

11. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Před použitím kočárku byste měli:

- Zkontrolujte, zda je rám kočárku správně rozložen a zda je mechanismus skládání rámu správně uzavřen (zajištěn).
- Zkontrolujte, zda je sedačka správně připevněna k rámu kočárku a zda je mechanismus připevnění sedačky k rámu kočárku správně uzavřen (zajištěn).
- Správně provést všechny úpravy a přizpůsobit kočárek potřebám dítěte, včetně nastavení vhodné hloubky terapeutického sedáku, vhodného sklonu terapeutického sedadla a sklonu opěradla, nastavit vhodný sklon opěrky nohou, upravit vhodnou délku pětibodových pásů. Zkontrolujte, zda jsou všechny seřizovací prvky správně usazený a zajištěny.
- Zkontrolujte, zda je čalounění kočárku suché. Zajistěte dítě všemi dostupnými stabilizačními prvky, jako jsou: pětibodové pásy, zužující se a měkké vložky, abdukční a stabilizační pásy, klín, opěrka nohou, popruhy opěrky nohou, bezpečnostní zábrana nebo terapeutický stůl. To má chránit dítě před vypadnutím a vyklouznutím z kočárku a chránit nožičky dítěte před pádem z opěrky nohou. Ujistěte se, že všechny úpravy provedené dříve jsou vhodné a bezpečné pro dítě.
- Ujistěte se, že dítě není umístěno v kočárku bez oděvu, který zakrývá tělo v místech kontaktu s čalouněním kočárku. Je to z důvodu prevence odřenin na těle dítěte a pro hygienu dítěte.
- V případě dětí, které mají problémy se zadržováním moči, by měla být na sedačku kočárku umístěna speciální voskovaná tkanina, kterou lze zakoupit v lékárnách nebo zdravotnických obchodech.
- V případě použití jakýchkoli dalších pomůcek, jako jsou venflony, drény, sáčky, katétry atd., se ujistěte, že jsou dobře zajištěny proti vypadnutí, vytržení, vytlačení a nepřekážejí při používání kočárku.

12. PŘEMÍSTĚNÍ KOČÁRKU

Nejlepší způsob, jak přepravovat kočárek, je tlačit jej pomocí jeho kol.

V případech, kdy to není možné (např. pro přepravu kočárku v autě), lze kočárek z bezpečnostních důvodů zvednout a přenášet oběma rukama po předchozím vyjmutí přídatného vybavení pro snížení přepravní hmotnosti a složení.

Při přenášení nebo zvedání rámu kočárku je třeba věnovat zvláštní pozornost. Rám by měl být přenášen po složení a namontování přepravního zámku.

K přenášení kočárku nepoužívejte další vybavení - mohlo by dojít k jeho poškození.

13. NASTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ Z KOČÁRKU

Při nastupování a vystupování z kočárku umístěte kočárek co nejbližší ke stabilnímu a bezpečnému místu, na kterém bude uživatel měnit svou polohu. Poté, co se ujistíte, že je zapnutá centrální brzda a opěrka nohou je zvednutá, aby na ní nestál, může uživatel přestoupit.

VAROVÁNÍ! Nestůjte na opěrce nohou, protože hrozí převrácení kočárku, zranění uživatele a riziko poškození výrobku.

Dbejte prosím na to, aby při nastupování nebo vystupování z kočárku dítě ani žádná jiná osoba nestála na opěrce nohou, mohlo by dojít k jeho poškození a zranění uživatele!

14. SPRÁVNÁ POLOHA V KOČÁRKU

Z bezpečnostních a zdravotních důvodů se doporučuje, aby měl uživatel boky a záda umístěna co nejbližší k opěradle, aby byla páteř rovnoměrně podepřena (optimální opora všech částí páteře tak, aby nevznikal žádný volný prostor).

Stehna by měla být co nejvíce podepřena, po celé délce, čehož je dosaženo nastavením hloubky sedáku kočárku a nohy by měly spočívat na desce opěrky nohou, což zabraňuje sklouznutí, udržuje optimální svalový tonus v nohou a přenáší část váhy z horní části těla.

15. POUŽÍVÁNÍ KOČÁRKU

Během používání vždy držte tlačnou rukojeť, abyste zabránili rozjetí kočárku.

Uvolněte centrální brzdu, držte rukojeť a tlačte kočárek bezpečným směrem.

16. POHYB PO ŠIKMÝCH PLOCHÁCH

Při pohybu do kopců nebo ramp vždy umístěte kočárek směrem dopředu. Omezte rychlost na šikmých plochách a pohybujte se co nejpomaleji.

Osoba tlačící kočárek musí mít dostatečnou sílu, aby mohla kontrolovat stabilitu kočárku.

Vždy mějte na paměti, že poloha těžiště kočárku se mění při jízdě po nerovném nebo svažitém terénu. V tomto případě je třeba věnovat zvláštní pozornost a kočárek musí být jištěn.

Při používání ramp se ujistěte, že rampa je vhodná, že kola kočárku jsou dostatečně vysoko, aby zvládla rampu, aby rám kočárku nepřišel do kontaktu s rampou a aby byla poskytnuta druhá osoba, která vám pomůže, protože existuje riziko převrácení kočárku, poškození výrobku a zranění uživatele.

17. PŘEKONÁVÁNÍ PRAHŮ NEBO OMEZENÍ

Při překonávání malých překážek (malé prahy, malé obrubníky atd.) použijte nohu k zajištění naklápací patky a zatlačením rukojeti dolů a směrem k sobě, abyste zvedli přední kola kočárku a opatrně přejeli přední kola přes překážku. Poté pomalu zatáhněte za tlačnou rukojeť nahoru, pryč od země, abyste zvedli zadní kola kočárku a opatrně přejeli zadní kola přes překážku.

18. PŘEPRAVA V AUTĚ A V JINÝCH VOZIDLECH

- Vyjměte z kočárku veškeré příslušenství a uložte jej na bezpečném místě. Složte kočárek a umístěte jej do kufru.

Pokud demontovaný kočárek není v kufru vozu odděleně od prostoru pro cestující, musí být rám kočárku pečlivě připevněn k vozidlu. K tomuto účelu můžete použít nepoužité bezpečnostní pásy.

- Za účelem přepravy kočárku v jiných dopravních prostředcích, jako jsou vlaky, tramvaje, autobusy, letadla, lodě apod., je nutné se informovat u osob odpovědných za přepravu v těchto dopravních prostředcích na podmínky bezpečné cesty s kočárkem do destinace a příslušné požadavky.



Kočárek MEWA by neměl být používán jako sedačka pro přepravu dítěte ve vozidle.

19. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Čalounění lze prát pouze ručně při teplotě do 30°C.

Skvrny by měly být odstraněny, jakmile se vytvoří na povrchu kočárku.

POZOR: Nečistěte chemikáliemi obsahujícími rozpouštědla a bělidla. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím nevhodných čisticích prostředků.

Před použitím se ujistěte, že je výrobek vždy suchý.

Pokud používáte čisticí prostředky určené pro tento typ materiálu - dodržujte pokyny použitého pracího prostředku.



Pouze ruční praní



Nebělte



Nesušte v sušičce



Sušte ve vodorovné poloze



Nežehlit

20. ULOŽENÍ KOČÁRKU

Čistý kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti, nejlépe při teplotě 0-35° C. Pro dlouhodobé skladování navíc postupujte podle kroků popsanych v bodě 21 "každý jeden měsíc".

21. SERVISNÍ A PERIODICKÉ PROHLÍDKY

Pro bezpečné a bezproblémové používání kočárku je nutné jej pravidelně a důkladně vystavovat kontrolám a servisu popsaným níže.

V situaci, kdy uživatel kočárku není schopen provádět výše uvedené činnosti sám, měl by se obrátit do specializovaného servisu kočárků nebo přímo výrobci, který řádně provede kontrolu a nezbytné servisní činnosti. Tyto aktivity mohou být zpoplatněny.

POZNÁMKA: Výrobce je odpovědný za vady nebo technické poškození kočárku způsobené pouze při správném ovládání kočárku. Odpovědnost za správnou funkci kočárku nese výrobce pouze v případě, že jsou přísně dodržována všechna doporučení výrobce.

POZNÁMKA: Výrobce je odpovědný za správnou funkci kočárku pouze v případě, že jsou v něm použity originální díly a originální příslušenství.

Veškeré opravy by měly být prováděny ve specializovaných autorizovaných servisech (viz bod 24) nebo přímo u výrobce. Opravy kočárku provedené kýmoli jiným než autorizovaným servisem nebo výrobcem ruší platnost záruky. Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo poškození produktu, které může být důsledkem oprav provedených jinými osobami než autorizovaným servisem nebo výrobcem.

Servis by měl být proveden:

- **Pokaždé před použitím kočárku**
 - Zkontrolujte účinnost centrální brzdy - Po aktivaci centrální brzdy by měla být obě zadní kola kočárku zablokována a nemohla by se otáčet.
 - Zkontrolujte připevnění konstrukčních prvků - Zkontrolujte všechny mechanismy kočárku a jeho pohyblivé části a věnujte pozornost zejména: správnému upevnění opěradla k rámu kočárku, správnému upevnění kol, správné funkci pětibodových pásů, správné funkci mechanismu nastavení úhlu sedadla, správné funkci mechanismu sklápění opěradla a správnému upevnění opěrky nohou.
 - Zkontrolujte stav pneumatik - Zkontrolujte, zda pneumatiky na všech čtyřech kolech nejsou poškozené nebo opotřebené.
 - Kontrola pevných částí rámu, sedadla s opěradlem a rámu opěrky nohou - Vizuální kontrola stavu konstrukčních profilů. Tyto součásti nesmí být poškozené nebo prasklé.
- **Každý měsíc**
 - Čištění kočárku
 - Vizuální kontrola všech pohyblivých prvků, ložisek, seřizovacích mechanismů – namažte silikonovým mazivem.
 - Zkontrolujte, zda nejsou všechny šroubové spoje uvolněné.

22. LIKVIDACE

Likvidace a recyklace: v souladu s předpisy specifickými pro danou zemi.

23. SOULAD S POŽADAVKY NA ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Zdravotnický prostředek třídy I v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích. Výrobce vydal k výrobku příslušné prohlášení o shodě, které je k dispozici na [adrese **www.mywam.eu**](http://www.mywam.eu)

24. SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH MÍST

POLSKO

MyWam sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Polsko

tel: +48 32 733 11 31

Webové stránky: www.mywam.eu

E-mailová adresa: mywam@mywam.eu

25. ZÁRUČNÍ LIST

Série a číslo:

Datum nákupu: - -

Razítko a podpis prodejce:

.....

.....

.....

Záruční podmínky

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zakoupený výrobek, a to po dobu 24 měsíců ode dne nákupu.
- **Kupující, který reklamuje kočárek, by měl kočárek doručit v původním v obalu, čistý (bez skvrn, dalšího vybavení, které nepatří ke kočárku, vlhkosti, vlasů atd.) spolu s komponenty kočárku chráněnými před poškozením.**
- **Na poškození způsobené nedostatečnou ochranou přepravy kočárku a jeho součástí se nevztahuje záruční oprava.**
- Žadatel nemůže požadovat odškodnění, pokud nesprávně označil nebo nesprávně pojistil přepravu kočárku a jeho součástí.
- Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k opravě kočárku.
- Činnosti uvedené v návodech, které je uživatel povinen provádět sám a na vlastní náklady, nelze v rámci záruční opravy provádět.
- Neoprávněné použití kočárku, které je v rozporu s tímto návodem k obsluze nebo v rozporu se zásadami správného provozu, ruší platnost záruky.
- Provedením jakýchkoli konstrukčních změn na kočárku zaniká záruka (buď v konkrétním segmentu, kde byly změny provedeny, nebo v plné výši).
- Na poškození kočárku způsobené: nesprávnou obsluhou, nesprávnou údržbou, nesprávným skladováním kočárku, mechanickým poškozením a přirozeným oděrem a opotřebením dílů (např. čalounění, kol) se nevztahuje záruka.
- Výrobce varuje před prováděním záručních oprav v neautorizovaných servisních střediscích. Zjištění takové opravy nebo neoprávněné úpravy kočárku způsobí ztrátu záruky.
- **Záruční list je platný za předpokladu, že obsahuje: zadané datum prodeje, potvrzené firemní pečeti prodávajícího, podpis prodávajícího, typ a sériové číslo kočárku.**
- Záruční list je platný, pokud neobsahuje výmazy a opravy.
- Výrobce kočárků provozuje svůj placený pozáruční servis.
- Ve věcech, na které se nevztahuje tento záruční list, platí ustanovení českého občanského zákoníku.
- Ve všech záležitostech týkajících se záruky kontaktujte prodávajícího.

26. POZNÁMKY