



NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!
UPOZORNĚNÍ: Obal uschovejte z důvodu dohledatelnosti a identifikace zdravotnického prostředku po celou dobu jeho životnosti!

PÁS BEDERNÍ NEOPRENOVÝ PA - 701

Určený účel :

mírná stabilizace bederní páteře cirkulární kompresí

Indikace

- stavy po lehčích úrazech stavy po lehčích úrazech a přetížení bederní páteře
- vertebrogenní algický syndrom mírného stupně
- prevence přetížení disků při fyzické námaze

Kontraindikace

- prostředek nesmí být přikládán na otevřené rány

Vlastnosti zdravotnického prostředku

- pás bederní neoprenový PA-701 je zdravotnický prostředek bandážního typu třídy I
- je zhotoven z prodyšného materiálu
- upínání pásu je realizováno velkropáskami (suchý zip)
- pro určení správné velikosti je třeba změřit obvod pasu v nejužším místě (viz.obr.na obalu)

VELIKOST	XXS/XS	S/M	L	XL	XXL
OBVOD PASU (cm)	66-78	78-94	94-102	102-110	110-118
ZADNÍ VÝŠKA PASU(cm)	24	26,5	26,5	26,5	26,5

Správné používání zdravotnického prostředku

- pás upevnit tak, aby byla širší část umístěna na zádech
- pás upevnit sepnutím upínacích prvků

Materiál

- NEOPRÉN / BAVLNA / POLYESTER 60 / 25 / 15 %

Reziduální rizika, upozornění

- **R- Ztráta účinnosti prostředku, případné zhoršení zdravotního stavu uživatele**
 - prostředek může být předepsán příslušným odborným lékařem nebo konzultován s ortopedickým technikem, respektive farmaceutickým laborantem ve výdejně
 - dobu a způsob používání prostředku určí lékař nebo ortopedický technik
 - nedoporučuje se zasahovat do konstrukce zdravotnického prostředku
 - na ztrátu účinnosti prostředku, případně na zhoršení zdravotního stavu pacienta může mít vliv skladování nebo sušení prostředku u topných těles a otevřeného ohně ve vzdálenosti menší než 1 m.
- **R- Vznik kožní alergie, infekce**
 - prostředek je určený k opakovanému použití jedné osobě, které byl určen, a je nepřenosný

- je třeba dbát na to, aby zdravotnický prostředek nevyvíjel tlak na ty části těla, které byly zraněné, případně jsou oteklé.
- **R- Nesprávný výběr velikosti**
 - menší velikost prostředku může způsobit silné stažení v aplikované oblasti s následným nedokrvěním, při velké velikosti je riziko ztráty léčebného účinku prostředku,
- **R- Při použití na otevřené rány hrozí vznik povrchové nebo vnitřní infekce**
 - zdravotnický prostředek nesmí být přikládán na otevřené rány

Manipulace, ošetřování, skladování a likvidace výrobků

- prát ručně ve vodě s maximální teplotou do 40 °C
- výrobky lze jemně ručně vyždímat
- sušit v rozloženém stavu, ne na topných tělesech a ve vzdálenosti menší než 1 m od nich
- prostředek nedoporučujeme: prát v pračce, čistit chemicky, žehlit žehličkou ani napařovat, bělit prostředky obsahujícími aktivní chlór, sušit v sušičce
- skladovat v suchém prostředí
- v případě likvidace zdravotnického prostředku použít smíšený odpad

Záruka a životnost zdravotnického prostředku

- lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění je 24 měsíců od data prodeje zboží (tuto lhůtu nelze zaměňovat s životností prostředku)
- seznam zdravotnických prostředků hrazených na poukaz spolu s limity je zveřejňovaný dle § 39t, odst. 1, zákona 48/1997 Sb., např. na stránkách SÚKL.
- doba životnosti zdravotnického prostředku je 5 let od data výroby

Reklamáce

- reklamáce se vztahuje pouze na vady materiálu nebo výrobní vady, v případě reklamáce zboží je kupující povinen předložit doklad o koupi zboží, při výdeji na poukaz na zdravotnický prostředek – záruční list
- hlášení závažných nehod je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu s dohledem nad zdravotnickými prostředky (SÚKL)

 **Datum
výroby:**

Výrobní kontrola:



**PROTETIKA,
a.s.,**
Bojnická 10
823 65
Bratislava



Tento výrobek
splňuje požadavky
nařízení (EU)
2017/745



Zdravotnický
prostředek

Telefon +421 2/4445 31 11
E-mail sekretariat@protetika.sk
predaj@protetika.sk
Internet <https://www.protetika.sk>

Společnost Protetika a.s. splňuje požadavky normy ISO 13485
Výrobek je ve shodě s požadavky Nařízení EP a Rady EU 2017/745

Datum vydání návodu k použití: 01/2025