

ORTEX 06J – Ortéza hlezenního kloubu rigidní – AIR WALKER

Ortéza je určena k fixaci kotníku.

Popis výrobku: Základem výrobku je plastový korpus s bočními výztuhami, s vloženou textilní částí obepínající kotník. Textilní část tvoří jednodílný, vepředu dělený čtyřvrstvý textil s integrovaným vzduchovým systémem. Pět/tři upínací popruhy na suché zipy umožňují snadné nasazení a v kombinaci se vzduchovým systémem dobrou trvalou pozici ortézy. Ortéza je univerzální pro pravou i levou nohu. Výrobek je vhodný pro osoby s hmotností do 120 kg.

Ortéza funguje na principu zpevnění postiženého místa v pozici, která podporuje procesy ke zlepšení stavu, pro který byla indikována.

Indikace: Po operaci vazů, měkkých tkání a šlach, po pooperativní a konzervativní léčbě talokrurálního kloubu, dislokované fraktury talokrurálního kloubu, konzervativní léčba zranění přední a střední části nohy a nártu, po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach, pro chronickou nepevnost vazů, další léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti a středního kotníku, pro časnou funkční terapii po konzervativní nebo chirurgické léčbě přetržené Achillovy šlachy.

Velikostní členění:

Velikost ortézy	Délka chodidla	Modifikace
S	22,5 – 25 cm	krátká / dlouhá
M	24,5 – 28 cm	krátká / dlouhá
L	27,5 – 30 cm	krátká / dlouhá
XL	nad 30 cm	krátká / dlouhá

Údržba a skladování:

Textilní části ortézy se perou běžnými pracími prostředky při teplotě do 30°C. Výrobky se suchým zipem je třeba prát zapnuté. Neždímat a nesusušit v sušičce! Výrobek skladujte na suchém místě, mimo přímé sluneční paprsky.



Výrobce:

ORTEX, spol. s r.o., L. Váchy 173, 760 01 Zlín, CZE

IČO: 15528294

TEL: +420 577 011 272-4

www.ortexzlin.cz, ortexzlin@ortexzlin.cz

Typ a název ZP:

ORTEX 06J – Ortéza hlezenního kloubu rigidní AIR WALKER

Základní UDI-DI: 85955714ORTEX06JQ4

Úhradový kód:



Zdravotnický prostředek třídy I., neměřicí, nesterilní

Výrobek je nepřenosný!

Číslo PN: OR-06J-23

Datum balení:

Balil:

Datum vydání návodu k použití: 25. 07. 2023

Datum a číslo revize návodu k použití: ---

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

ORTEX 06J – Ortéza hlezenního kloubu rigidní - AIR WALKER

Důležité informace:

- výrobek nesmí být přikládán na otevřené rány!
- každá změna nastavení ortézy musí být určena ošetřujícím lékařem
- pomůcka je určena pro opakované používání osobě, které byla předepsána a je nepřenosná!
- délku užívání ortézy určuje ošetřující lékař

Výrobce neručí za vzniklé škody, případné zhoršení zdravotního stavu nesprávnou aplikací nebo užitím výrobku.

Doporučujeme se poradit o vhodnosti použití daného výrobku s odborným ošetřujícím lékařem.

Vedlejší účinky:

Dosud nebyly zjištěny systematické vedlejší účinky. Předpokladem je odborná aplikace/naložení. Všechny terapeutické prostředky přikládáné zvenčí na tělo (bandáže, ortézy) mohou, pokud doléhají příliš pevně, způsobit lokální tlakové projevy nebo i výjimečně stlačovat cévy a nervy.

V případě, že se akutně léčíte nebo trpíte chronickým onemocněním, které by mohlo souviset s oblastí aplikace pomůcky, vždy její použití konzultujte s odborným ošetřujícím lékařem.

Bezpečnostní upozornění:

Závažné nežádoucí příhody, definované v článku 2 č. 65 Nařízení (EU) 2017/745 (MDR), ke kterým by došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Reklamacce:

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu. Při reklamaci je nutno předložit reklamovaný výrobek, vč. identifikace šarží/LOT a UDI, uvedených na etiketě výrobku nebo štítku balení, doklad o nákupu a kontaktní informace reklamujícího. Reklamacce lze uplatnit u prodávajícího/poskytovatele zdravotnického prostředku, popř. na adrese výrobce. Reklamovat lze pouze čisté výrobky. Záruka může být omezena nebo vyloučena v případě nedodržení pokynů k údržbě nebo pozměňování výrobku.

Likvidace výrobku:

Použitý výrobek likvidujte prostřednictvím systému sběru domovního odpadu v místě Vašeho bydliště nebo odevzdejte ve sběrném recyklačním místě. Výrobek nespalujte.

NÁVOD NALOŽENÍ VÝROBKU



Ortézu vyjme z obalu, uvolníme pásy se suchými zipy, odděláme přední plastový kryt nártu a holeně, a vyjme vnitřní botu. Přiložené výstelky jsou určeny k případnému doplňkovému vyložení kolem končetiny.

Vnitřní botu naložíme na poraněnou končetinu a zapneme, tak aby těsně přiléhala ke končetině.

Končetinu s textilním dílcem uložíme do pevného rámu ortézy.

Přiložíme plastový chránič nártu a holeně, tak aby ventil a balonek pumpy vzduchového systému byl umístěn ve středu otvoru chrániče.

Následně přitáhneme upínací popruhy ze suchého zipu. Pozor na to, aby popruh suchého zipu nezasahoval do mechanismu vzduchového systému!!!

Pro nafouknutí vnitřní boty uzavřete ventil (2) a pumpujte (stiskem pumpy 1) dokud nedosáhnete požadovaného tlaku. Regulace tlaku a vypuštění vzduchu se provádí pomocí ventilu (2).

⚠ Po delším nošení zkorrigujte usazení ortézy.