

Obuv pro odlehčení části nohy



217R1/... Model „Komet“

Návod k použití

Obsah

1 Všeobecná doporučení.....	3
2 Oblast použití.....	3 – 4
2.1 Indikace.....	4
2.2 Kontraindikace.....	4
3 Technická data.....	5 – 6
3.1 Velikostní tabulka.....	5
3.2 Příslušenství.....	5
3.3 Materiál	6
4 Aplikace.....	6
5 Technické údaje.....	6
6 Údržba	6
7 Použití.....	7
7.1 Omezení použití	7
7.2 Doba používání	7
8 Garance	8 – 9
8.1 Podmínky garance	8
8.2 Délka garance a její omezené trvání	8
8.3 Rozsah garance a vyloučení.....	9
8.4 Garanční servis.....	9
9 Prohlášení o shodě	10
10 Likvidace	10



Další informace a rady naleznete na stránkách
www.streifeneder.de/op/dfs.

1 Všeobecná doporučení

217R1/...

Vážený zákazník/uživatel,

Váš lékař Vám předepsal vysoce kvalitní zdravotní pomůcku – obuv pro odlehčení části nohy "Komet". Pomůcka byla vyrobena v souladu s nejnovějšími znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje.



Postupujte, prosím, podle tohoto návodu k použití. To Vám zajistí úspěch Vaší léčby. Protetický technik, prodejce zdravotnických potřeb nebo ošetřující lékař Vám rád zodpoví dotazy týkající se používání obuvi pro odlehčení části nohy "Komet".

2 Oblast použití

- rozložení tlaku a odlehčení přednoží díky rigidní (= pevné) podrážce, podporuje v odvalu hojení ran v přednoží
- vyjímatelná polstrovaná vložka zmírňuje tlak po celé délce chodidla
- zpevněná oblast paty a pásky v přednoží poskytují oporu nohy
- nastavitelné pásky suchého zipu pro přizpůsobení šířce nohy
- široký, hranatý tvar podešve v oblasti přednoží pro pooperační péči za použití Kirschnerových drátů
- vysoká odolnost proti skluzu díky profilované podrážce
- polstrovaná vložka je vybavena antibakteriálně na bázi amonium-silanové sloučeniny. To snižuje osídlení materiálu určitými bakteriálními kmeny (např. *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*).

2.1 Indikace

- rány v oblasti přednoží vzniklé diabetes mellitus
- onemocnění periferních arterií
- jiné na indikaci nezávislé vznikající rány v přednoží
- pooperační, při korekturách a poraněních přednoží



Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními v oblasti nohy a hlezna jsou otlaky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat chodidla, obvazy nebo ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů nebo otázek, zpomalení hojení rány nebo z důvodu pacientova rozhodnutí o přerušení terapie (“komplikace“) kontaktujte, prosím, svého ošetřujícího lékaře nebo vyškolený personál, který Vám pomůcku předal.

2.2 Kontraindikace

- nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy a odlehčení tlaku
- nenoste obuv přímo na poraněné, podrážděné nebo poškozené pokožce (před použitím chraňte pokožku obvazem a ponožkou)
- nepoužívejte při nestabilních frakturou ohrožených diabetických osteoartropatických syndromech nohy (např. Charcotova noha)

3 Technická data

3.1 Velikostní tabulka

Měření velikosti obuvi

Velikost obuvi	Vnitřní délka obuvi	Vnitřní šířka obuvi	Obj. č.
35 – 36	cca 242 mm	cca 103 mm	217R1/36
37 – 38	cca 255 mm	cca 106 mm	217R1/38
39 – 40	cca 268 mm	cca 109 mm	217R1/40
41 – 42	cca 282 mm	cca 112 mm	217R1/42
43 – 44	cca 295 mm	cca 115 mm	217R1/44
45 – 46	cca 308 mm	cca 118 mm	217R1/46
47 – 48	cca 322 mm	cca 121 mm	217R1/48
49 – 50	cca 335 mm	cca 124 mm	217R1/50

Obuv pro odlehčení části nohy “Komet” je možné nosit na levé i pravé noze.

3.2 Příslušenství

Polstrovaná symetrická 10mm vložka vyrobená z materiálu EVA s velurovým potahem		Ochranný kryt přednoží s vnější flaušovou stranou	
Velikost obuvi	Obj. č.	Velikost obuvi	Obj. č.
35 – 36	217R11/36	35 – 36	217R12/36
37 – 38	217R11/38	37 – 38	217R12/38
39 – 40	217R11/40	39 – 40	217R12/40
41 – 42	217R11/42	41 – 42	217R12/42
43 – 44	217R11/44	43 – 44	217R12/44
45 – 46	217R11/46	45 – 46	217R12/46
47 – 48	217R11/48	47 – 48	217R12/48
49 – 50	217R11/50	49 – 50	217R12/50

3.3 Materiál

Obuv pro odlehčení části nohy je vyrobena z následujících materiálů:

Podrážka:	PU-tvarovaná podrážka:	100 %	PU	polyurethan
Polstrovaná vložka:	pěna:	100 %	EVA	ethylen vinyl acetát
	potah:	100 %	PES	polyester
Podšívka:		100 %	PES	polyester
Suché zipy:		100 %	PA	polyamid

4 Aplikace

Rozepněte všechny suché zipy na obuvi pro odlehčení části nohy a umístěte poraněnou nohu do boty na vložku patou na doraz k opatku. Poté zapněte botu utažením všech suchých zipů tak, aby noha nemohla vyklouznout.



Poznámka: Před prvním vyzkoušením boty nasadte na nohu pacienta plastový sáček (je součástí balení). Tím se zabrání kontaminaci boty bakteriemi v případě, že je třeba změnit velikost.

5 Technické údaje



Pro individuální přizpůsobení pacientovi dle indikace lze podrážku boty upravovat broušením a lepením.

Avšak výrobce nebo dodavatel vzhledem k těmto změnám nenese odpovědnost za případné škody nebo následné škody, resp. kontraindikace.

Model obuvi "Komet" je možné nosit na levé i pravé noze!

Tloušťka polstrované vnitřní vložky je cca 10 mm a efektivní výška podpatku cca 10 mm pro všechny velikosti!

6 Údržba



- před praním uzavřete všechny suché zipy
- nesušte na přímém zdroji tepla

7 Použití

Obuv pro odlehčení části nohy "Komet" vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení dle indikace lékaře. Veškeré změny musí být provedeny odborným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Vzhledem k přizpůsobení a z hygienických důvodů, smí být výrobek používán pouze jedním uživatelem. Nesmí být používán další osobou.

7.2 Doba používání

Doba používání je určena ošetřujícím lékařem.

8 Garance

Následující garance je platná v souladu s jinými relevantními zákony danými garančními nároky a je od těchto nezávislá. Garance je poskytována namísto jakýchkoli jiných vyjádřených nebo nepřímo vyjádřených garancí nebo vhodných garancí pro konkrétní účel.

8.1 Podmínky garance

Nároky vyplývající z garance výrobce lze uplatňovat pouze v případě, že byl výrobek použit podle tohoto návodu k použití a dle doporučení personálu, který Vám výrobek předal. Pokud Vám byl výrobek přizpůsoben akreditovaným ortopedickým technikem, byl řádně a pravidelně udržován ve stanovených intervalech, záleží v případě uplatnění garance na rozsahu provedené úpravy. Přizpůsobení obuvi pacientovi musí být ortopedickým technikem potvrzeno datem, razítkem a stvrzeno podpisem. Odpovídající ověření musí být dodavateli nebo přímo f. Streifeneder ortho.production GmbH předloženo bez žádosti, při uplatnění nároků vyplývajících z této garance.

8.2 Délka garance a její omezené trvání

Délka garance od výrobce se liší v závislosti na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Konkrétní podmínky garance pro tento výrobek jsou následující:

Délka garance: 217R1 Obuv pro odlehčení části nohy "Komet" = 3 měsíce

Nároky vyplývající z této garance musí být neprodleně písemně uplatněny u dodavatele nebo přímo u f. Streifeneder ortho.production GmbH, a to nejpozději do 1 měsíce od zjištění nároku dle této garance.

Právo uplatňovat nároky na garanci po uplynutí této lhůty jsou výslovně vyloučeny.

8.3 Rozsah záruky a vyloučení

Je zaručeno, že výrobek je bez materiálových a výrobních vad.

Garance se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- chybného přizpůsobení a aplikace,
- chybné manipulace,
- nevhodného použití (zejména v rozporu s danými pokyny výrobce),
- běžného opotřebení,
- vnějších vlivů (např. vyšší moc nebo zásahy ze strany třetích osob).

Stejně tak nejsou zahrnuty optické vady bez vlivu na funkčnost daného výrobku, rovněž vady vyplývající z kombinace poškozených komponentů, použitím komponentů neschválených f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo zásahy či opravami prováděnými neautorizovaným prodejcem f. Streifeneder ortho.production GmbH.

Tato garance nevytváří závazky vůči f. Streifeneder ortho.production GmbH a dodavateli, pokud se jedná o náhradu následné škody nebo poškození jakéhokoli druhu či jiných nároků na náhradu škody. Výjimkou jsou závazné právní předpisy, dle kterých f. Streifeneder ortho.production GmbH nad rámec dobrovolné garance ručí.

8.4 Garanční servis

Jsou-li splněny všechny podmínky této garance f. Streifeneder ortho.production GmbH na základě vlastního uvážení výrobek opraví nebo vymění zdarma.

9 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že 217R1 Obuv pro odlehčení části nohy "Komet" je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EEC.

10 Likvidace

Výrobek je pro člověka a životní prostředí nezávadný a lze jej recyklovat. Výrobek musí být zlikvidován nebo zrecyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Návod k použití je chráněn autorským zákonem. Kopírování kompletního návodu k použití nebo i částí v jakékoliv formě je povoleno pouze s výslovným písemným povolením f. Streifeneder ortho.production GmbH. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou informativní a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení možných mírných odchylek v konstrukci, tvaru, barvě nebo v obsahu balení. Produkty mohou být změněny bez předchozího upozornění po tisku tohoto návodu k použití v 2018-04. Všeobecné obchodní podmínky jsou kdykoliv k nahlédnutí na www.streifeneder.com/op.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Germany
T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de/op

Prodejce v ČR:

ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz