

Návod k použití 4 kolové skládací chodítko / rollator

COMMODE

Tento návod je nedílnou součástí dodaného produktu.



Popis jednotlivých součástí



Krok 1: Vyndejte chodítko z přepravní krabice, 4 křídlové šrouby jsou součástí balení



Krok 2: Rozevřete zabalené chodítko, přední a zadní kolečko dejte dolů a zajistěte pomocí křídlových šroubů



Krok 3: Zavěste nákupní tašku a zajistěte pomocí suchého zipu ke rámu chodítka. Zmáčkněte pojistku na boku rámu a nastavte chodítko do požadované výšky. Pojistka musí poté vyskočit zpět skrz polohovací otvor.



Pokud chcete chodítko zabrzdit, zmáčknete brzdu dolů. Pokud odbrzdit, tak vytáhněte brzdu vzhůru.



Chodítko je vybaveno držákem hole. Tu vložte do držáku na hůl a k rámu chodítka připevněte pomocí suchého zipu.



Návod k použití:

-celková váha 8,5kg

Rozložení chodítka

Umístěte chodítko na rovný povrch směrem, kterým se chcete pohybovat. Rozložte chodítko a zajistěte ruční brzdou.

Oběma rukama zatlačte na sedák dolů až do pozice, kdy zaklapnou pojistky mechanismu. Nevkládejte ruce pod sedák, abyste předešli poranění od pojistného mechanismu. Uvolněte přední kolečka a položte je na zem. Poté zajistěte pomocí křídlových šroubů. Po plném rozložení můžete zavěsit nákupní tašku.

Složení chodítka

Sundejte nákupní tašku z rámu chodítka. Zatáhněte za bezpečnostní pás, který je uprostřed sedátka, směrem vzhůru a chodítko se složí. Povolte křídlové šrouby a složte kolečka. Po plném složení použijte opět křídlové šrouby k zajištění chodítka ve složené poloze.

Chodítko jsou výškově stavitelné, proto jej upravte dle výšky uživatele tím, že odjistíte pojistný systém na obou stranách chodítka, upravíte výšku a znovu zajistíte. Chodítko má 8 výškových poloh. Při skládání a rozkládání chodítka dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k zachycení částí těla nebo oblečení.

Brzdy

Pohotovostní brzda – při tlačení – Zatáhněte za páčku brzdy směrem vzhůru.

Parkovací brzda – při zastavení nebo sezení – Odtlačte páčku brzy směrem dolů.

Bezpečnostní pokyny

Vždy dodržujte minimální a maximální povolenou výšku pojistného systému chodítka.

Nevěšte se na držadla chodítka – hrozí překlopení.

Vždy dodržujete maximální dovolené zatížení udávané výrobcem:

Zatížení chodítka – max. 136kg.

Zatížení nákupní tašky – max. 5kg

Při prudkých klesáních a stoupáních používejte brzdy.

Používejte chodítko na zpevněném povrchu.

Vždy se ujistěte, že je chodítko plně rozloženo a zajištěno.

Nepoužívejte chodítko k jiným než předepsaným účelům.

Nepoužívejte k přepravě materiálu nebo těžkých předmětů.

Údržba

Čištění a dezinfekce by se měla provádět v pravidelných intervalech. Použijte mýdlovou vodu k odstranění nečistot. Na dezinfekci mohou být použity standardní dezinfekční prostředky. K čištění nepoužívejte tlakové čističe.