

**CT 0.25mm(31G)x6mm**

100 ks

Pro použití s inzulinovým perem / Pro jednorázové použití  
Na použití s inzulinovým perem / Na jednorázové použití

**JEHLY DO INZULÍNOVÉHO PERA**

**MEDSUN**

**Symboly:**

- Nepoužívať opakovane
- Nepoužívať znovu
- MD Jednorázová jednotka
- Kód batche
- Datum výroby
- Datum výroby
- Výrobca
- Výroba
- Pozor / varování
- Datum výroby
- Datum výroby
- Převlék na rukavici na použití
- Převlék na rukavici na použití
- Dosezna
- Dosezna
- Recyklovatelný obal
- Recyklovatelný obal
- Recyklovatelný obal
- Recyklovatelný obal

**Model : CT**

**Kompatibilné s /Kompatibiln s:** Humapen Luxura, Ergo II, Luxura HD/ Unipen® HFZSQ-1/ Novo Nordisk® Novopen 4, Novopen 5, Novopen Echo/ Ypsopen® Ypsomed AG/ClikSTAR® ClikSTAR/ AllStar® AllStar/Gensuper® Gensuper 60-1/ Sulin Pen® 3ml: 300IU/Gansulin Pen® 3ml/

**Indikácie na použitie:** Jednorázová ihla na inzulinové pero je určená použitie s injekčným perom na subkutannú injekciu inzulinu.

**Podmienky skladovania:** Tento produkt by sa mal skladovať v čistej miestnosti bez korozívnych plynov s dobrým vetraním.

**Indikácie k použití:** Jednorázová jehla pre inzulinové pero je určená k použití s injekčným perom pre subkutannú injekciu inzulinu.

**Podmienky skladovania:** Tento produkt by mohol byť skladovaný v čistej miestnosti bez korozívnych plynov a dobré ventiláciu.

**Ningbo Medsun Medical Co., Ltd.**  
No. 298 Huangjiu Road, Jiangbei, 315031 Ningbo  
People's Republic of China

**SC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**  
Eiffestrasse 80  
20537 Hamburg  
GERMANY

**Distributor pre SK a CZ:**  
Lorex Biotechnology s.r.o.  
Kysak 147,  
0481 1 Kysak, Slovensko  
Tel.: +421 55 6943 965  
Email: lorex@lorex.sk  
www.lorex.sk

**CE 0123**

**Návod na použitie :**  
**Návod k použití :**

**POZOR**

**SK 1. Ihly do pera sa dodávajú sterilné.**  
2. Ihly do pera sú speciálne zdravotnícke pomocky na injekciu. Používajte by malí dosť relevantné skolenie alebo pokyny.

**3. Ihly do pera sú na jedno použitie. Nepoužívajte opakovane.**

**4. Poraďte sa so svojim zdravotníckym pracovníkom o pomoc s príslušným modelom a špecifikáciu.**

**5. Použité ihly sa majú zlikvidovať ako medicínsky odpad.**

**6. Nevyužívajte ihly v nasledujúcich prípadoch**

**7. Ichy do pera sú jedno použitie. Nepoužívajte znova.**

**8. Obratne sa na svého lekára o pomoc ohľadom vhodného modelu a špecifikáciu.**

**9. Použité ihly by mali byť zlikvidované ako lekársky odpad.**

**CZ 1. Jehly pro pera se dodávají sterilné.**  
2. Jehly pro pera jsou specifický zdravotnické prostředky pro lekářského. Uživatelé by měli dostát relevantní skolení a pokynů.

**3. Jehly pro pera jsou na jedno použití. Nepoužívajte znova.**

**4. Obratě se na svého lekáře o pomoc ohledně vhodného modelu a špecifikace.**

**5. Použité jehly by měly být zlikvidovány jako lekárský odpad.**

**6. Jehly ne smí používat v následujícím použití obal je vlnky a pleštiny;**

**7. jednotlivé obaly jsou otevřené nebo poškozené; produkt je prošlý; produkt byl použit; trubička jehly je ohnutá.**

**8. Používajte produkt správně, aby nedošlo k poranení jehel.**

**Pokud dojde k nahodnému pichnutí, okamžitě vyhledejte lekársku pomoc.**

**9. Přípravek je určen na subkutannou injekci inzulinu.**

**10. Ihly pro pera se dodávají sterilné.**

**11. Ihly pro pera jsou jedno použití. Nepoužívajte znova.**

**12. Obratě se na svého lekáře o pomoc ohledně vhodného modelu a špecifikácií.**

**13. Použité jehly by měly být zlikvidovány jako lekárský odpad.**

**14. Nehy ne smí používat v následujícím použití obal je vlnky a pleštiny;**

**15. jednotlivé obaly jsou otevřené nebo poškozené; produkt je prošlý; produkt byl použit; trubička jehly je ohnutá.**

**16. Používajte produkt správně, aby nedošlo k poranení jehel.**

**Pokud dojde k nahodnému pichnutí, okamžitě vyhledejte lekársku pomoc.**

**17. Přípravek je určen na subkutannou injekci inzulinu.**

**Subkutánné ihaviny určené na injekci:**  
Brucho, vonkajšie stehno, vonkajšia horná časť zadku a horná časť zadku.

**CT 0.25mm(31G)x6mm**

100 ks

**IHY DO INZULÍNOVÉHO PERA**

**JEHLY DO INZULÍNOVÉHO PERA**

**MEDSUN**

**Symboly:**

- Nepoužívať opakovane
- Nepoužívať znovu
- MD Jednorázová jednotka
- Kód batche
- Datum výroby
- Datum výroby
- Výrobca
- Výroba
- Pozor / varování
- Datum výroby
- Datum výroby
- Převlék na rukavici na použití
- Převlék na rukavici na použití
- Dosezna
- Dosezna
- Recyklovatelný obal
- Recyklovatelný obal
- Recyklovatelný obal
- Recyklovatelný obal

**Product Name: Blood Lancet for Single Use**

**LOT** 1322017 **UDI** (01) XXXXXXXXXXXXXXXX  
2022-10-10 (10) 1322017 (11) 221010  
2027-10-09 (17) 271009

BZ-JS-105/2.1(Rev.04)