

Návod k použití silikonového pěnového obvazu



Popis

Silikonový pěnový obvaz se skládá z měkké silikonové kontaktní vrstvy, absorpčního polštářku z polyuretanové pěny, vrstvy se superabsorpčními vlákny, netkané textilie a paropropustné voděodolné fólie.

Silikonový pěnový obvaz je absorpční a atraumatický – absorbuje exsudát, udržuje optimální vlhké prostředí pro hojení ran a působí jako bariéra proti tekutinám a mikroorganismům z rány. Kontaktní plocha silikonového pěnového obvazu s ránou je potažena vrstvou měkkého silikonu, který se nelepí na povrch rány a po odstranění nezpůsobuje trauma jemné nové tkáně. Tato měkká silikonová vrstva je také mírně lepivá, což usnadňuje aplikaci a udržení krytí na neporušené kůži, ale nezpůsobuje stržení epidermální vrstvy ani bolest při odstraňování.

Indikace

Obvaz ze silikonové pěny je určen k ošetření exsudujících ran, jako jsou vředy na nohou a chodidlech, dekubity, traumatické a chirurgické rány, povrchové popáleniny a popáleniny I. stupně. Obvaz absorbuje exsudát a udržuje optimální vlhké prostředí pro hojení rány a zároveň minimalizuje riziko macerace. Obvaz může být aplikován a měněn klinickými lékaři nebo pacienty.

Kontraindikace

Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí nebo alergií na kteroukoliv složku obvazu.

Způsob použití

1. Před i po výměně obvazu je nutno dodržovat místní hygienické postupy.
2. Před použitím obvazu se ujistěte, že je oblast rány čistá a suchá.
3. Vyberte obvaz vhodné velikosti tak, aby obvaz přesahoval okraj rány alespoň o dva centimetry.
4. Před použitím odstraňte krycí fólii a přilepte obvaz na oblast rány. Nenatahujte.

Frekvence převazů

Interval mezi výměnami obvazu zcela závisí na stavu rány a povaze sekundárního obvazu. Obvaz aplikovaný na silně exsudující nebo strupovité rány může být zpočátku nutné vyměňovat denně. S postupujícím hojením rány a snižováním množství exsudátu je možno interval mezi jednotlivými převazy prodloužit až na 7 dní.

Upozornění


Strupovité rány ošetřené silikonovým pěnovým obvazem se mohou zpočátku zvětšovat v důsledku autolytického débridementu, který je podporován vlhkými podmínkami vytvořenými pod krytím. Tento jev je zcela běžný a lze jej očekávat.

Klinicky infikované rány, kde je aplikované silikonové pěnové krytí se stříbrem by měly být pečlivě sledovány. Za předpokladu, že infekce neustoupí by měla být zvážena systémová antibiotická terapie.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě <35 °C, dobře větraných čistých prostorách a relativní vlhkosti vzduchu <80 %. Nevystavujte korozivnímu plynu.

Jiné

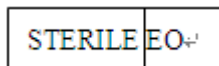

Obvaz byl sterilizován EO.



Určeno k jednorázovému použití.



Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.



jsou registrované ochranné známky společnosti Longterm Medical Technology Co., s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.



Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd.

Adresa: ShuangShan Road 277, Fuxi Street, Deqing County, Huzhou City,
Zhejiang Province, People's Republic of China



Lotus NL B.V.

Adresa: Koningin Julianaplein 10,1e Verd, 2595AA Haag, NIZOZEMSKO

Vytvořeno: 10.05.2022

Revize č.:B/0