

Návod k použití absorpčního obvazu



Popis

Absorpční obvaz je sterilní, vysoce absorpční a nepřilnavý obvaz pro lokální použití a nabízí vynikající management exsudátu pro středně až silně exsudující rány. Vyznačuje se vícevrstvou konstrukcí skládající se z netkané textilie, vysoce absorpčního jádra vyrobeného ze super absorpčních vláken (SAF), polyuretanové pěny s vrstvou polyuretanové fólie, a kontaktní vrstvy vyrobené z polyetylenové fólie nebo měkkého silikonového lepidla.

Kontaktní vrstva je nepřilnavá k ráně a šetrná ke křehké kůži, minimalizuje trauma a bolest při výměně obvazu. Absorpční jádro nepřetržitě pohlcuje exsudát z rány a přeměňuje jej na gel, který uzamyká tekutinu v obvazu. Tento mechanismus pomáhá udržovat optimální vlhké prostředí pro hojení ran a zároveň chrání kůži v okolí rány před macerací a snižuje riziko bakteriální kontaminace.

Absorpční obvaz je měkký, přizpůsobivý různým anatomickým konturám a snižuje tlak v oblasti rány.

Indikace

Absorpční obvaz je určen pro středně až silně exsudující rány, jako jsou diabetické vředy na nohou, odběrová místa, bérkové vředy, dekubity (všech stupňů), traumatické a chirurgické rány.

Cílová populace

Absorpční obvaz lze použít u dětí i dospělých.

Klinické výhody

Absorpční obvaz dokáže absorbovat velké množství exsudátu z rány a zadržet tekutinu v absorpčním jádře obvazu, čímž zabraňuje maceraci rány a chrání kůži v okolí rány před poškozením.

Kontraindikace

1. Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí nebo alergií na kteroukoliv složku obvazu.
2. Neaplikujte na oči, sliznice nebo šlachy kvůli riziku dehydratace.
3. Nepoužívejte v tělní dutině nebo dutinách (obvaz při absorpci tekutiny zvětší objem).
4. Neaplikujte na suché rány – vysoká savost může způsobit přilnutí a vysychání rány, což vede k bolesti.
5. Nepoužívejte na popáleniny třetího stupně.
6. Nepoužívejte k zastavení krvácení – tento produkt není hemostatické činidlo.

Návod k použití

1. Očistěte ránu fyziologickým roztokem a nechte oblast rány zaschnout.
2. Vyberte obvaz vhodné velikosti tak, aby obvaz přesahoval okraj rány alespoň o dva centimetry.
3. Přiložte hladkou nebo lepicí stranu obvazu na spodinu rány. Obvaz zajistěte na místě lepicími páskami nebo obvazy podle potřeby.
4. U silně exsudujících ran zajistěte okraje obvazu lepicí fólií, abyste zabránili úniku tekutiny z rány.

Frekvence převazů

1. Při každé výměně obvazu zkontrolujte spodinu rány, zda nevykazuje známky infekce nebo zhoršení stavu.
2. Obvaz měňte každých 7 dní nebo častěji, v závislosti na stavu rány.
3. Obvaz neprodleně vyměňte, jakmile dojde k jeho znečištění, nasáknutí nebo znehodnocení.
4. V případě přischnutí obvazu k ráně opláchněte spodinu rány sterilním fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou, abyste usnadnili jeho odstranění.

Bezpečnostní opatření/varování

1. Pouze pro jednorázové použití. Nelze používat opakovaně. Opětovné použití může způsobit křížovou kontaminaci.
2. Pouze pro vnější použití.
3. Obvaz nestříhejte.
4. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo narušený – mohla by být narušena sterilita.
5. Nepoužívejte s oxidačními činidly, jako je roztok chlornanu nebo peroxid vodíku.
6. Infekce nebo krvácení by měly být ošetřeny před aplikací obvazu.
7. V případě projevů infekce či zhoršení stavu rány přestaňte obvaz používat a stav konzultujte se zdravotnickým pracovníkem.
8. Přestaňte obvaz používat, pokud se objeví zarudnutí, otok, zvýšená teplota nebo bolest a stav konzultujte se zdravotnickým pracovníkem.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě a v suchu. Chraňte před slunečním zářením.

Skladovatelnost

Výrobek je možno skladovat po dobu 3 let za stanovených podmínek skladování.

Likvidace

Použitý výrobek zlikvidujte v souladu s národními předpisy.

Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd.

Dostupné velikosti

Kód	Velikost	Kód	Velikost
Nelepivé		Potažené silikonem	
S00404	10 cm x 10 cm	S10203	6 cm x 7 cm
S00406	10 cm x 15 cm	S10304	7 cm x 10 cm
S00408	10 cm x 20 cm	S10404	10 cm x 10 cm
S00410	10 cm x 25 cm	S10406	10 cm x 15 cm
S00412	10 cm x 30 cm	S10408	10 cm x 20 cm
S00507	12 cm x 18 cm	S10410	10 cm x 25 cm
S00606	15 cm x 15 cm	S10412	10 cm x 30 cm
S00608	15 cm x 20 cm	S10606	15 cm x 15 cm
S00609	16 cm x 22 cm	S10608	15 cm x 20 cm
S00808	20 cm x 20 cm	S10808	20 cm x 20 cm
S00810	20 cm x 25 cm	S10810	20 cm x 25 cm
S02012	30 cm x 30 cm	S10812	20 cm x 30 cm
S00812	20 cm x 30 cm	S11010	25 cm x 25 cm
S01010	25 cm x 25 cm	S11212	30 cm x 30 cm
S01510	40 cm x 25 cm	S10710	17,5 cm x 27,5 cm
S00505	12,5 cm x 12,5 cm	S10610	15 cm x 25 cm
S00509	12,5 cm x 22,5 cm	SS01010	10 cm x 10 cm
		SS00909	9 cm x 9 cm
		SS01313	13 cm x 13 cm
		SS01717	17 cm x 17 cm
		SS01519	15 cm x 19 cm
		SS01515	15 cm x 15 cm

Seznam symbolů

	Výrobce		Značka CE a identifikační číslo notifikované osoby
	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství		Číslo šarže
	Opatrnost		Datum výroby
	Určeno k jednorázovému použití		Použití
	Není určeno ke sterilizaci		Uchovávejte v suchu
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený		Chraňte před slunečním zářením
	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu		Prostudujte si návod k použití
	Skladujte při pokojové teplotě		Zdravotnický prostředek
	Jednoduchý sterilní bariérový systém		Určeno k distribuci



Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd.

Adresa: ShuangShan Road 277, Fuxi Street, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, People's Republic of China

Email: innomed@longterm-health.com



Lotus NL B.V.

Adresa: Koningin Julianaplein 10,1e Verd, 2595AA Haag, NIZOZEMSKO

E-mail: info@lotusnl.com

Upozornění!

Pokud dojde k nějakému vážnému incidentu v souvislosti s výrobkem, nahlaste tuto skutečnost výrobcí, distributorovi nebo příslušnému orgánu ve vaší zemi.

Spisová značka MDR/LT 10-05-01

Vytvořeno: 20.3.2025

Revize č.: B/0