

NÁVOD K POUŽITÍ INSTRUCTIONS FOR USE

CS NAVRŽENO PRO ZVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍHO WC PRKÉNKA O 5 CM. UJISTĚTE SE, ŽE MÁ PRKÉNKO VYJÍMATELNÉ FIXAČNÍ ŠROUBY A VYMĚŇTE JE ZA NOVÉ. FIXAČNÍ ŠROUBY KRATŠÍ NEŽ 10 CM NELZE POUŽÍT. POKUD KOMBINUJETE S NÁSTAVCEM NOBI, POUŽIJTE STÁVAJÍCÍ FIXAČNÍ ŠROUBY. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE, ŽE JSOU VLOŽENY PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY, ŽE JE NÁSTAVEC BEZPEČNĚ A STABILNĚ PŘIPEVNĚN A V PŘÍPADĚ POTŘEBY ŠROUBY DOTÁHNĚTE. VYVARUJTE SE JEJICH PŘÍLIŠNÉHO PŘETAŽENÍ. JE NA ZODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE PROVÁDĚT POČÁTEČNÍ A NÁSLEDNÉ PRAVIDELNÉ HODNOCENÍ RIZIK.

EN DESIGNED TO RAISE THE HEIGHT OF EXISTING TOILET SEATS BY 5CM. ENSURE TOILET SEAT HAS REMOVABLE FIXINGS AND REPLACE WITH THE PROVIDED FIXINGS - FIXINGS LESS THAN 10CM ARE NOT APPLICABLE FOR USE. IF USING WITH THE NOBI TOILET SEAT CONTINUE TO USE THE EXISTING FIXINGS. ENSURE FIXINGS ARE TIGHT BEFORE USE. AVOID OVERTIGHTENING FIXINGS TO ENSURE TOILET SEAT DOESN'T RIDE UP. PERIODICALLY CHECK FIXINGS FOR TIGHTNESS - ADJUST AS NECESSARY. ENSURE NON SLIP FEET ARE INSERTED BEFORE USE. CHECK FOR STABILITY BEFORE USE. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER/ OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR LOCAL RISK ASSESSMENTS.



PRIMA® LIFT

ZVÝŠENÍ ZÁCHODOVÉHO PRKÉNKA

Představujeme Vám nový produkt od Gordon Ellis.
Doufáme, že Vám pomůže v každodenním životě.



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE OBĚ STRANY TOHOTO NÁVODU.



CS POKUD SE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ STANE JAKÁKOLIV VÁŽNÁ NEHODA, NAHLAŠTE JI VÝROBCI - VIZ NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY.



MAX
190 Kg
420 lbs



MAXIMÁLNÍ
NOSNOST





INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ

ČISTĚTE NEABRASIVNÍ UTĚRKOU A MÝDLOVOU VODOU NEBO V AUTOKLÁVU.

PH 5 - 9

Vaš PRIMA® LIFT byl speciálně navržen UK Design Team pro co možná nejjednodušší použití s účelem předejít zranění a zmírnit obtíže během dočasného nebo trvalého pohybového postižení. Pomáháme ulehčovat každodenní život.

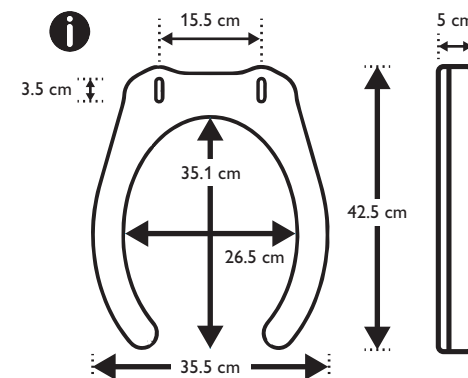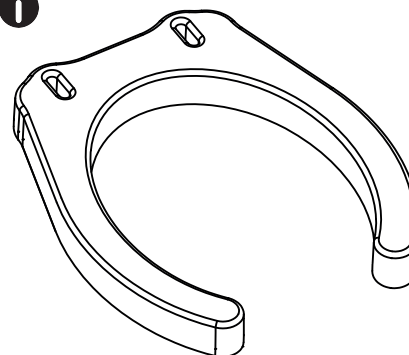

KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDETE NA
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

 [gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)
 [@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)



DESIGNED
& MADE IN
UK



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT



DMA PRAHA S.R.O.,
KRAJANSKA 339, 149 00 PRAHA 4,
CZECH REPUBLIC



MD

IFU-REF 66190-1020-CS

PART REF 66190

EC REP

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR,
TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA


KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDETE NA
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

 [gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)
 [@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)



❶ Pro použití se stávajícím prkénkem: **A** **B**

Dodané nářadí:

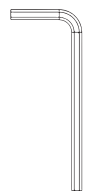

x 1

Dodané díly:



x 2



x 2




x 4



x 2




x 2

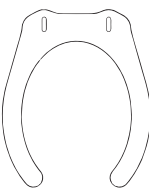

x 1

Potřebné díly:

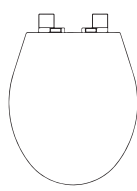


x 1

❶ Pro použití s prkénkem nobi: **A** **C**


Dodané díly:

Potřebné díly: Díl číslo: 62450/ 62455

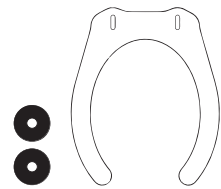


x 2

x 1

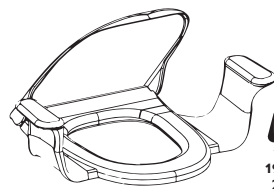

x 1

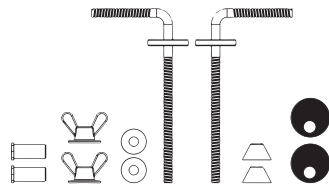

x 2

x 2



x 2

x 2

x 2


x 2

x 2

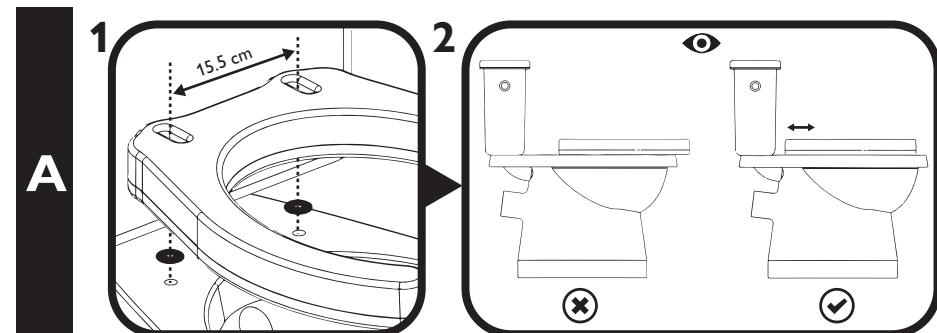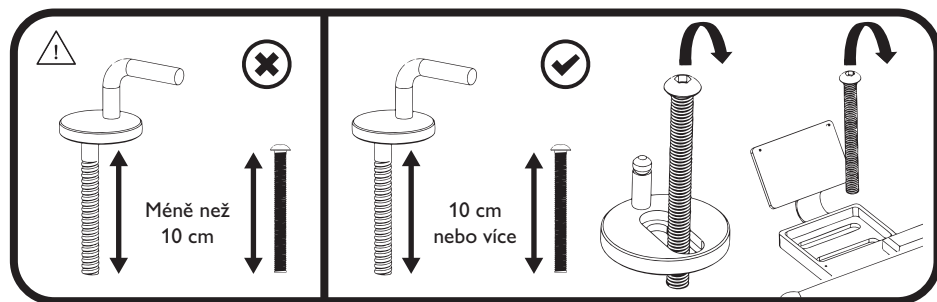

B1
NEBO
C1

B

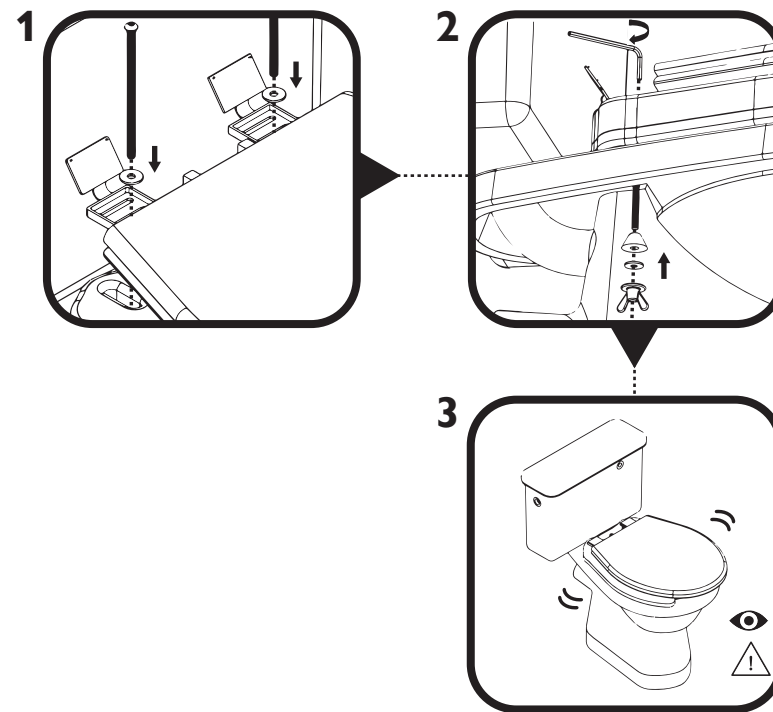

C

