

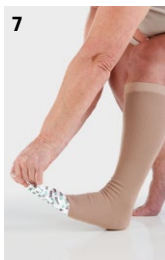
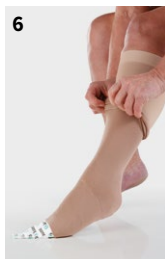


Juzo Ulcer System

Juzo Ulcer System Add

Návod k použití

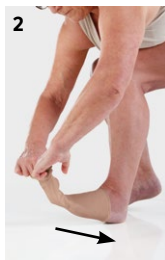

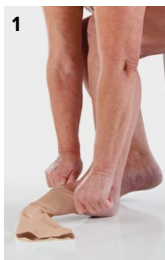

Zamýšlené použití

Léčebná sada Juzo Ulcer System je systém zdravotních kompresních punčoch pro léčbu vředů a obsahuje dvě kompresivní punčochy, které lze kombinovat: Skládá se z návleku (Juzo Ulcer Dynamic) a dvou podkolenek (Juzo Ulcer Liner) pro výměnu a fixaci obvazu na ránu. nebo . Produkt Juzo Ulcer System Add (následná dodávka) obsahuje pouze běžové podkolenky. Tyto dvě součásti punčochy lze použít následovně: Podkolenku lze nosit na postižené noze ve dne i v noci pro dlouhodobou kompresi. Návleky se nosí přes podkolenky během dne, aby se zvýšila komprese.

Návod k použití

Pro kompresní punčochy s otevřenou špičkou použijte navlékací pomůcku Juzo Slippie. Váš odborný prodejce vám rád ukáže, jak jej správně používat. Na juzo.de/dressing najdete další videonávody pro všechny Juzo převazové pomůcky. Jakmile ráno vstanete, nasadíte si kompresní prádlo na uvolněnou nohu. Navlékněte a svlékněte si kompresní prádlo vsedě, abyste předešli zranění a pádům. Hrubé, nepilované nehty nebo kroužky s ostrými hranami atd. mohou velmi jemnou tkaninu poškodit. Doporučujeme proto používat speciální rukavice Juzo. Nehty a mozoly mohou způsobit poškození, stejně jako vadná podšívka boty. Při nasazování Juzo Ulcer Liner se ujistěte, že leží bez vrásek a že obvaz nebo péče o rány neklouže.

Oblékání (Obr. 1 – 8)

1. Chcete-li si nasadit podkolenku, přetáhněte ji přes předloktí a prsty uchopte vnitřní část chodidla. Otočte punčochu naruby vytažením k patě. Oběma rukama protáhněte nožní otvor a přetáhněte nožní část přes chodidlo až k nártu. Ujistěte se, že úplet paty sedí na patě. Při oblékání dbejte na to, aby šev podkolenky byl na vnější straně. To chrání citlivou pokožku v oblasti prstů.
2. Postupně přetahujte podkolenku dále přes nohu - zároveň ji opět vytočte pravou stranou ven.
3. Nyní vytáhněte punčochu rovnoměrně a bez záhybů - bez kroucení nebo tahání za okraje - a zároveň ji položte plochou rukou na nohu. Pokud jste punčochu vytáhli příliš daleko, jednoduše ji zatlačte zpět ke kotníku a poté ji vytáhněte směrem nahoru s menším napětím. Barevné označení v oblasti nártu a paty vám pomůže ke správnému umístění punčochy.
4. Nyní si přetáhněte přiloženou pomůcku na nazouvání Juzo Slippie přes nohu tak, aby kratší poutko bylo přes nárt / Zadní část chodidla a delší poutko spočívá na chodidle.

5. Apoté přetáhněte punčochu přes pomůcku na nazouvání Juzo Slippie, dokud pata pletené punčochy nespočine v poloze paty. Konec navlékací pomůcky musí vyčnívat z přední části punčochového otvoru v oblasti prstů.
6. Nyní vytáhněte celou punčochu po částech nahoru ke koleni a položte ji na nohu současně s plochou ruky. Vezměte prosím na vědomí, že komfort nošení je nejlepší, když je okraj návleku umístěn cca 2 cm pod okrajem podkladové punčochy.
7. Nakonec odstraňte pomůcku na nasazování Juzo Slippie vytažením z přední části chodidla.
8. Hotová souprava pro ošetření Juzo Ulcer System.

Svlékání (Obr. 9 – 10)

Nesvlékejte obě punčochy současně, ale nejprve složte návleky dolů a stáhněte si ji dolů k bérce. Poté jej opatrně sundejte přes patu, nárt a chodidlo. Po úplném odstranění horního návleku zopakujte tyto kroky při sundávání podkladové punčochy.

Vezměte prosím na vědomí:

Kompresní prádlo noste pouze podle pokynů lékaře. Kompresní oděvy by měly být poskytovány pouze specializovaným lékařským prodejcům, a to náležitě vyškoleným personálem. Vaše kompresní oblečení Juzo je do značné míry odolné vůči olejům, mastím, vlhkosti pokožky a dalším vlivům prostředí. Určité kombinace mohou ovlivnit trvanlivost pleteniny. Doporučují se proto pravidelné kontroly u prodejce. V případě poškození se obraťte na svého specializovaného prodejce. Neopravujte jej sami - může to zhoršit kvalitu a lékařský účinek. Z hygienických důvodů je tento výrobek určen pouze pro jednu osobu. Všitá textilní etiketa je důležitá pro identifikaci a sledovatelnost produktu. Žádáme vás proto, abyste šitěte za žádných okolností neodstraňovali.

Pokyny pro praní a údržbu

Věnujte prosím pozornost pokynům pro údržbu na všitém textilním štítku. Kompresní prádlo doporučujeme před praním obrátit naruby. Kompresní prádlo perte poprvé samostatně (možnost změny barvy). Pokud je to možné, kompresní oděvy by se měly prát denně na jemný cyklus (40 °C). Tip: Sítka na prádlo poskytují dodatečnou ochranu pleteniny. Prosím, nepoužívejte aviváž! Při ručním praní důkladně opláchněte, neždímejte. Doporučujeme jemný speciální čisticí prostředek Juzo. Dobu schnutí můžete zkrátit tak, že kompresní prádlo po vyprání položíte na silný froté ručník, pevně srolujete a silně vyždímáte. Poté kompresní prádlo volně zavěste. Nenechávejte ho ležet v ručníku a nesušte na topení ani na slunci. Při sušení v bubnové sušičce použijte prosím šetrný cyklus (vhodný pro sušení v bubnové sušičce: viz textilní štítek). Juzo kompresní oblečení se nesmí chemicky čistit.

Materiálové složení

Přesné informace naleznete na všitém textilním štítku.

Pokyny pro skladování a trvanlivost

Skladujte v suchu a chráňte před slunečním zářením. Pro sériové výrobky platí maximální trvanlivost 36 měsíců. Poté následuje životnost kompresního oděvu 6 měsíců. Životnost závisí na správném zacházení (např. péči, nasazování a sundávání) a běžném používání výrobků. Životnost zdravotnického prostředku je vytištěna na štítku krabičky se symbolem přesýpacích hodin. Po 6 měsících používání je nutná nová kontrola tělesného měření odborným lékařem. Pokud dojde k významné změně příslušných tělesných rozměrů (např. v důsledku úspěchu terapie, změna hmotnosti) části těla, která již byla ošetřena, lze nové měření a nové ošetření provést také dříve, než konec období 6měsíční doba používání musí být odůvodněna.

Indikace

Terapie bércových vředů, léčba smíšených (tepenných a žilních) bércových vředů (s přihlédnutím ke kontraindikacím), použití místo kompresních obvazů nebo jako doplněk ke kompresním obvazům po redukci otoků, prevence recidiv bércových vředů, zmírnění bolesti u bércových vředů.

Kontraindikace

Pokročilé onemocnění periferních tepen (pokud platí jeden z těchto parametrů: ABPI < 0,5, arteriální tlak v kotníku < 60 mmHg, tlak v prstech < 30 mmHg nebo TcPO₂ < 20 mmHg dorzum nohy). Místnavé srdeční selhání (NYHA III + IV), septická flebitida, phlegmasia coerulea dolens. V následujících případech by mělo být terapeutické rozhodnutí učiněno zvážením přínosů a rizik a výběrem nejvhodnějšího kompresního prostředku: Těžké mokvavé dermatózy, nesnášenlivost kompresního materiálu, závažné senzorické poruchy končetin, pokročilá periferní neuropatie (např.), primární chronická polyartritida.

Důležité

Pokud jsou v ošetřované oblasti otevřené rány, musí být oblast rány nejprve pokryta vhodným krytím nebo obvazem, než se nasadí kompresní oděv. Při nedodržení kontraindikací nemůže skupina společností Julius Zorn GmbH převzít žádnou odpovědnost.

Vedlejší efekty

Při správném použití nejsou známy žádné vedlejší účinky. Pokud se však během předepsaného užívání vyskytnou negativní změny (např. podráždění kůže), okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo specialistu. Pokud jste si vědomi nesnášenlivosti jedné nebo více složek tohoto produktu, poraďte se před použitím se svým lékařem.

Pokud se vaše příznaky při nošení výrobku zhorší, odstraňte výrobek a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobce neručí za škody/zranění způsobené neodbornou manipulací nebo nesprávným použitím. V případě reklamací týkajících se produktu, jako je poškození pleteniny nebo vady střihu, se prosím obraťte přímo na svého zdravotnického prodejce. Výrobci a odpovědnému orgánu členského státu musí být hlášeny pouze vážné události, které mohou vést k významnému zhoršení zdraví nebo smrti. Závažné incidenty jsou definovány v článku 2 č. 65 nařízení (EU) 2017/745 (MDR).

Likvidace

Výrobek musí být po použití zpravidla zničen běžným způsobem likvidace. Vezměte prosím na vědomí platné místní/národní předpisy.

Význam symbolů



Výrobce



Autorizovaný zstupce ve Švýcarsku



Zdravotnický prostředek



Datum výroby



Doba použitelnosti



Šarže



Produkt. číslo



Unikátní identifikace produktu



www.juzo.com



Skladujte v suchu



Chránit před slunečním zářením



Likvidace v domovním odpadu



Stanovení účelu:komprese

Zpětná vazba

Máte zpětnou vazbu k našim produktům, návrhy nebo nápady? Pak se prosím zúčastněte našeho průzkumu.



Do you have any product feedback, suggestions or ideas you'd like to share? If so, please take our survey.



Platí pro:

Juzo Ulcer System, Juzo Ulcer System Add

Made in Germany



www.juzo.com



Julius Zorn GmbH · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Germany · info@juzo.com · juzo.com



Berro AG · Austrasse 7 · 9055 Bühler · Suisse

UK responsible person: Juzo UK Ltd

The Vision Building · 20 Greenmarket · Dundee DD1 4QB · Great Britain