

NÁVOD K POUŽITÍ PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Tento návod k použití se vztahuje na níže uvedené modely pasivních antidekubitních matrací.

Název	Určený účel	Výška, nosnost
FAGRON MEDISLEEP BASIC	Antidekubitní matrace FAGRON MEDISLEEP BASIC je určena k prevenci a léčbě dekubitů u pacientů s nízkým rizikem dekubitů.	Výška matrace 10 cm, nosnost 110 kg.
FAGRON MEDISLEEP I.	Antidekubitní matrace FAGRON MEDISLEEP I. je určena k prevenci a léčbě dekubitů u pacientů se středním rizikem dekubitů.	Výška matrace 14 cm, nosnost 140 kg.
FAGRON MEDISLEEP II.	Antidekubitní matrace FAGRON MEDISLEEP II. je určena k prevenci a léčbě dekubitů u pacientů se středním rizikem dekubitů.	Výška matrace 14 cm, nosnost 180 kg.
FAGRON MEDINAP	Antidekubitní matrace FAGRON MEDINAP je určena k prevenci a léčbě dekubitů u pacientů se středním rizikem dekubitů.	Výška matrace 14 cm, nosnost 180 kg.
FAGRON MEDIGO	Antidekubitní matrace FAGRON MEDIGO je určena k prevenci a léčbě dekubitů u pacientů se středním rizikem dekubitů.	Výška matrace 15 cm, nosnost 200 kg.
FAGRON MEDICARE	Antidekubitní matrace FAGRON MEDICARE je určena k prevenci a léčbě dekubitů u pacientů s vysokým rizikem dekubitů.	Výška matrace 14 cm, nosnost 180 kg.
FAGRON MEDIHELP	Antidekubitní matrace FAGRON MEDIHELP je určena k prevenci a léčbě dekubitů u pacientů s vysokým rizikem dekubitů.	Výška matrace 16 cm, nosnost 180 kg.
FAGRON MEDIDREAM	Antidekubitní matrace FAGRON MEDIDREAM je určena k prevenci a léčbě dekubitů u pacientů s velmi vysokým rizikem dekubitů.	Výška matrace 14 cm, nosnost 180 kg.

Výrobce

FAGRON a.s.

Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika

IČ: 46709355

DIČ: CZ46709355

Informace o matraci

Jádro matrace je vyrobeno kombinací různých polyuretanových, viskoelastických a latexových materiálů, které slouží k prevenci a zmírnění dekubitů a k odlehčení zatížení části těla a obnovení prokrvení.

- Jedná se o zdravotnický prostředek.
- Matrace splňuje podmínky normy ČSN EN 1334 a použítá PUR pěna Öko - Tex Standard 100, třída I. – vhodná i pro děti do tří let.
- Z důvodu technologie výroby PUR pěn či pěnové pryže, se může z nové matrace uvolňovat chemický zápach, který je zdravotně nezávadný a měl by po odvětrání vyprchat během dvou týdnů.
- Použité materiály v matracích jsou lehce hořlavé.
- Matrace může být slepena z několika částí.
- Snímatelný potah je zhotoven z SAFR.
- Při likvidaci drobných zahoření lze použít hasicí přístroje sněhové nebo práškové.
- Likvidace matrace se provádí skládkováním, jednotlivé komponenty matrace lze recyklovat.
- Obal matrace je zhotoven z PE-LD materiálu (nízkohustotní polyetylén) a je zpětně recyklovatelný.

Návod na ošetřování matrace

Aby Vám matrace dobře sloužila k danému účelu, doporučujeme Vám se řídit návodem na ošetření matrace:

- Matraci pokládejte na lamelový rošt s minimálním počtem 24 lamel (s maximální mezerou mezi lamelami 40 mm) nebo pevnou prodyšnou podložku s maximálně 40 mm širokými otvory po celé ploše. Pružinové matrace se nesmí pokládat na polohovatelné rošty.
- Použitím doporučené podložky nebo roštu a pravidelným otáčením zvýšíte životnost matrace a zároveň snižujete její možnou deformaci, která by neměla překročit 15 % výšky matrace.
- Nevhodná podložka: pevná podložka bez možnosti přístupu vzduchu či rošty s velkými mezerami mezi jednotlivými lamelami.
- Matraci je možné používat při teplotách od +5 °C do +50 °C.
- Matraci nevystavujte přímému slunečnímu záření ani vlhkému prostředí, uchráníte tím barevné odstíny potahu a prodloužíte životnost matrace.
- Potah matrace je snímatelný a lze jej prát nebo chemicky čistit (viz symboly pro ošetřování potahu).
- Při snímání a navlékání potahu dbejte na to, aby nebyl poškozen návlak ani jádro matrace nebo nedošlo k poškození zdrhovadla.
- Nedoporučujeme snímat separační potah (pokud je součástí matrace)!
- Matrace dodávané v komprimovaném stavu je spotřebitel povinen nechat po vyjmutí z obalu minimálně 48 hodin bez zátěže v klidovém stavu.
- Matraci během používání min. 4x za rok provětrejte.
- Potah pratelný do 95 °C, snížená hořlavost. Lze jej ošetřovat běžnými desinfekčními prostředky.

Nepovažuje se za vadu:

- Odlišné zbarvení pěny oproti vyobrazené matraci – vzhledem k několika druhům dodavatelů PUR pěn, mají jednotlivé typy pěn i různé barvy. Barva dodávané pěny nemá vliv na kvalitu ale, může se lišit, avšak vždy se jedná o shodné materiály. Výrobce garantuje typ materiálu, technické vlastnosti u jednotlivě nabízených výrobků, bez garance barevnosti pěny. Rovněž tak barevnost potahu.
- Za vadu se nepovažuje opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Obvyklým užíváním se rozumí změna barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebením potahu (např. zvlhnutí materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů.
- Za vadu se nepovažuje případné změny v rozměru potahu způsobené běžným používáním matrace.
- Za vadu se nepovažuje zvýšená potivost na matraci (materiály v podobě líné pěny mohou způsobovat zvýšený pocit tepla, potivosti).
- Součástí matrace může být rovněž konstrukční spoj (dolepení, slepení jednotlivých vrstev), který nemá vliv na funkčnost a užité vlastnosti matrace.

U matrací z polyuretanových pěn jsou povoleny následující tolerance:

- Ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max. 15 %
- Změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max. 40 %
- Tolerance rozměru matrace v délce je +/- 15 mm, v šířce +10 mm / - 20 mm
- Tolerance výšky jádra matrace +/- 10 mm
- Přípustná tolerance tuhosti (tvrdosti) jádra matrace (odpor proti stlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%

Záruční list matrace

Pokud budou dodrženy zásady správného používání a ošetřování dle návodu, poskytuje výrobce záruku na kvalitu výrobku v trvání 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na opotřebení matrace způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě materiálové nebo výrobní vady reklamujte výrobek v prodejně, kde jste jej zakoupili. Při reklamaci předložte potvrzený záruční list nebo doklad o zaplacení. Bez průkazných dokladů o prodeji nebude matrace k reklamaci přijata. **Reklamovaná matrace musí být řádně vyčištěna, zbavena nečistot a hygienicky nezávadná dle obecných hygienických zásad. Matrace musí být vhodně zabalena, aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození a ušpinění. Reklamační řád naleznete na www.fagron.cz.**

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu.

ZÁRUČNÍ LIST

Prodávající

Razítko + podpis

Datum prodeje:

Název/typ výrobku:

Datum reklamace:

Razítko a podpis přijetí:

Šarže/datum výroby:

